

# Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna

## Aktuellt på DHC

Arbetet med att införa Visma webSesam går framåt och du som är intresserad kan läsa mer här och anmäla dig till ett nyhetsbrev; [Införande - Visma webSesam - Region Dalarna](#)

## Sortiment

### Säkerhetsmeddelande gåstativ Beta (betastöd)

En incident har inträffat med gåstativ Beta, från leverantören Swereco, där patient halkat och fallit när gåstativ Beta använts i vått utrymme. För att minimera risken för att detta ska upprepas har produktens bruksanvisning uppdaterats med tydligare information i avsnittet för säkerhetsanvisningar med bland annat beskrivning att gåstativ Beta inte skall användas på blött underlag. Den nya bruksanvisningen följer med nyinköpta gåstativ Beta och bruksanvisning finns att ladda ner på hemsidan för produkter som står på lager och är köpta innan uppdateringen gjordes. Viktigt att säkerställa att rätt bruksanvisning följer med gåstativ Beta, när det förskrivs. Säkerhetsmeddelandet gäller alla storlekar av gåstativ Beta från leverantören Swereco, **DHCnr 14462, DHCnr 11653 och DHCnr 14886.**

Vid frågor kontakta: [adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se)

### Bäddmadrass CX10 och Madrass CX15 exkl kontrollenhet



Observera att dessa levereras utan kontrollenhet from december 2024. Ni måste komma ihåg att beställa en kontrollenhet A4 artikelnr 62832 eller en kontrollenhet IQ 62833 till bädd-/madrassen. Mer information finns i sortimentsöversikt madrasser som ni hittar på vår hemsida.

### Riktlinje Personlyft

Riktlinje Personlyft har reviderats och finns nu publicerad på vår hemsida. Du hittar den under <https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/> och under rubriken +Förflyttning.

# Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna

Nytt avtal på Personlyftar och lyftselar

1 februari 2025 träder ett nytt avtal på personlyftar och lyftselar i kraft. Förändringarna är dessa:

- Ny hjullyft i form av Birdie Evo 180kg från leverantören Invacare. Den tidigare upphandlade hjullyft GL5.2 från leverantören Guldmann kommer att finnas kvar i sortiment och vara beställningsbar en längre tid.
- Basselar familj, dvs låg, axelhög och hög lyftsele med normalstor bendelsöppning blir LowBackSling, BasicSling och HighBackSling från leverantören DHG (tidigare Handicare)
- Hygiensele med bälte blir HygieneSling från leverantören DHG.
- Lyftsele amputation blir AmpSling från leverantören DHG. I föregående avtal kunde man välja lyftselar amputation från flera olika leverantörer, i detta avtal är det bara en leverantör upphandlad.
- Lyftsele hel-sele, med axelhög rygg och hög rygg, är en ny produkt. Vi har avtal med två leverantörer; Comfort Sling Soft och Comfort Sling High Soft från leverantören Human Care samt Sit-on Comfort och Sit-ot Comfort High från leverantören Guldmann.
- Ytterligare en ny produkt är barnselar. Med barnselar menas axelhög och hög lyftsele med normalstor bendelsöppning samt hygiensele i storlek som passar barn från 4-5 år upp till tonåringar. Här kan man välja på lyftselar från leverantörerna DHG, Etac, Human Care och Guldmann.



Sortimentsvisning av personlyftar och lyftselar är planerade i april. Inbjudan och möjlighet att anmäla sig kommer inom kort. Håll utkik på vår hemsida, [Utbildningar - Dalarnas Hjälpmedelscenter](#)

[Uppdaterade guider för manuella rullstolar.](#)

Nu är många beställningsguider uppdaterade. Tänk på att de kan vara till hjälp när ni lägger en order på en manuell rullstol. Spara inte gamla guider utan kontrollera alltid att du har den senaste versionen. Även vår inställningsguide för manuella rullstolar är uppdaterad.

[Lång leveranstid på sittdynor?](#)

Vi har fått till oss att flera upplever att det är lång leveranstid på sittdynor. Hör av er om ni upptäcker att en dyna inte levererats enligt önskad leveranstid. Maila

[teamsst.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:teamsst.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se) och ange ordernummer, så kan vi undersöka vad som är problemet och se om vi kan hitta lämplig ersättningsdyna om leveranstiden blir lång.

[Rullstol HD Balance 24](#)

Vi har haft några incidenter under förra året kring rullstol HD Balance 24" som har välut framåt när patienterna böjt sig fram och lagt nästan all sin tyngd på fotplattorna alternativt försökt rest sig upp på fotplattorna. Rullstol HD Balance är balanserad för att vara lättkörd vid leverans, vilket innebär att tyngdpunkten är längre fram och att rullstolen i sämsta fall kan välta framåt om man lägger för mycket av sin vikt på fotplattorna. Tänk därför på att kontrollera tipprisken (framåt och bakåt) när ni

# Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna

provar ut rullstolen samt informera om att man inte får stå på fotplattorna (gäller alla rullstolar). Om ni ser en ökad risk att en patient skulle kunna välta framåt så kan man balansera om HD Balance (här kan ni läsa om hur man gör: [95942\\_BA\\_Balanspunkt.pdf](#)) men då kommer rullstolen bli tyngre att framföra. Tippskydd fram finns inte.

## Sortimentgrupper

Sortimentsgrupp Kommunikation och kognition har möte 10 mars. Kontakta din ledamot om du har något att föra fram till mötet.

## Utbildning

Sortimentsvisningar på gånghjälpmedel

5 februari är det sortimentsvisning av gånghjälpmedel på Skomakargatan 22 i Borlänge.

6 februari genomförs samma sortimentsvisning på Kompetenscentrum, Tallbacken, Falun.

Klockan 10 – 12 eller 13 – 15 båda dagarna. Genomgång i grupp varje hel timme.

OBS! Den 5 februari klockan 13 finns möjlighet att delta på genomgången via Teams (anmäl som vanligt och ange att du vill delta via Teams)

[Webbutbildning trycksår och madrass AreaZone med Care of Sweden](#)

Care of Sweden bjuder in vårdpersonal till en kostnadsfri trycksårutbildning samt genomgång av CuroCell AREA Zone i syfte att öka kunskapsnivån inom trycksår och förebyggande åtgärder med mål att minska förekomsten av trycksår och därmed även höja vårdkvalitén.

Under våren 2025 erbjuds denna utbildning vid tre tillfällen: 29/1, 4/3 och 24/4 och pågår en timme med starttid klockan 14.

Mer information och anmälan:

<https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/utbildningar/>