
Standard, förebyggande och behandlande madrasser mot trycksår

Standardmadrass är direktupphandlad av Dalarnas Hjälpmedelscenter för att kunna förskrivas tillsammans med hemsjukvårdssängen. Avtalet gäller till och med december 2026

Antidecubitusmadrasser (förebyggande och behandlande madrasser) upphandlas tillsammans i 7-klövern, denna gång har vi även övertagit 5-klövern förebyggande och behandlande madrasser så dubbla avtal inte ska finnas. Detta avtal gäller from 1/10-2024 till och med 31/9- 2026 med option på förlängning 1 + 1år.

Har du synpunkter på sortimentet vänder du dig till din närmaste representant i sortimentsgruppen. Har du reklamationsärenden behöver de gå genom oss konsulenter och det görs enklast via vår funktionsmail.

Order på madrasser görs främst via webSesam med förskrivarkod, i andra hand via kundservice.
Rådgivning görs via konsulenter i ADL-teamet, vi nås på telefontid:

mån 13:00-15:00, tis 08:00-09:00, ons 13:00-15:00 el tors 08:00-09:00 på 010-2497880

E-post: adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Riktlinjen för antidecubitusmadrasser finns att läsa på

<https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/>

Innehåll

Sårklassificering enligt EPUAP	3
Viktig information	4
Madrassindelning	5
Standardmadrass Solatium	7
Bottenmadrass Solatium	8
Bäddmadrass mjukfiber 3-delad	9
Bäddmadrass HFT Sensitive	10
Bäddmadrass Optimal 5zon	11
Madrass Greenline PLUS/PRO	12
Madrass Dyna Form Mercury	13
Madrass Dacapo Ampla	13
Madrass MAXX 250 Greenline	14
Madrass Optimal 5zon PLUS	14
Bäddmadrass CuroCell S.A.M. PRO CF10	15
Madrass AREA ZONE	16
Bäddmadrass CuroCell CX10	17
Bäddmadrass ROHO	18
Madrass CuroCell CX15	19
Kontrollenhet A4	20
Kontrollenhet IQ	20
Benämningar:	21

Sårklassificering enligt EPUAP

INTERNATIONELLT KLASSIFIKATIONSSYSTEM FÖR TRYCKSÅR ENLIGT NPUAP/EPUAP

Trycksår är en lokaliserad skada på hud och/eller underliggande vävnad vanligen över benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv. Det finns också ett antal bidragande faktorer som kan relateras till trycksår, men betydelsen av dessa faktorer återstår att undersöka.

Kategori/stadie I: Hudrodnad som inte bleknar vid tryck

Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar vid tryck. Mörkt pigmenterad hud kan sakna detta tecken, men färgen skiljer sig från omkringliggande hudområden. Området kan vara smärtsamt, fast, mjukt, varmare eller kallare än annan hud. Kategori 1 trycksår kan vara svårt att upptäcka hos personer med mörk hudfärg. Kategori 1 trycksår kan indikera att personen är i riskzonen för att utveckla djupare trycksår.

Kategori/stadie II: Delhudsskada

Delhudsskada som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbedd utan fibrinbeläggning. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld eller blodfylld blåsa. Visar sig som ett blankt eller torrt ytligt sår utan fibrinbeläggning eller ytligt hematom. Denna kategori ska inte användas för att beskriva hudflikar, hudskador efter häfta, inkontinensrelaterad dermatit eller maceration.

Kategori/stadie III: Fullhudsskada

Fullhudsskada. Subkutan fett är synligt, men ben, sena eller muskler syns inte. Fibrinbeläggning kan vara synlig men döljer inte skadans djup. Kan inkludera underminering och fistlar. Djupet av ett Kategori 3 trycksår varierar beroende på anatomisk lokalisering. Näsrygg, öra, bakhuvud och malleoler saknar subkutan fettvävnad och Kategori 3 trycksår kan vara ytliga på dessa lokaliseringar. Motsatsen gäller för områden med riklig subkutan fettvävnad som kan utveckla extremt djupa Kategori 3 trycksår. Ben/senor är inte synliga eller palpabla.

Kategori/stadie IV: Djup fullhudsskada

Djup fullhudsskada som involverar ben, sena eller muskel. Fibrin eller nekros kan synas. Ofta förekommer underminering och fistlar. Djupet av Kategori 4 trycksår varierar med anatomisk lokalisering. Exempelvis saknas subkutan fettvävnad på näsrygg, öra, bakhuvud och malleoler och sår på dessa lokaliseringar kan vara ytliga. Kategori 4 trycksår kan involvera muskler och stödjevävnad (t ex fascia, sena, ledkapsel) vilket gör det sannolikt att osteomyelit och osteit uppstår. Blottade ben och muskler är synliga eller direkt palpabla.

Icke klassificerbart trycksår: sårdjup är okänt

Fullhudsskada där sårbotten är täckt av död vävnad/nekros (gul, gulbrun, grön eller brun) och/eller sårskorpa (gulbrun, brun eller svart). Det är inte möjligt att avgöra djupet förrän tillräckligt med nekros och/eller fibrin har tagits bort. Stabil (torr, fast, intakt utan rödhet eller fluktuation) sårskorpa på hämlarna fungerar som kroppens naturliga (biologiska) "plåster" och ska inte avlägsnas.

Misstänkt djup hudskada: sårdjup okänt

Lila eller rödbrunt lokaliserat område med missfärgad intakt hud eller blodfylld blåsa som uppstått på grund av tryck, och/eller skjuv som medfört skada på underliggande vävnad. Området kan upplevas smärtsamt, hårt, mjukt, varmare, och kallare vid jämförelse av intilliggande hud. Djup vävnadsskada kan vara svårt att upptäcka på individer med mörk hudfärg. Såret kan utvecklas vidare och döljas av en tunn sårskorpa. Utvecklingen kan gå fort och involvera ytterligare vävnadslager trots optimal behandling.

Viktig information

Välj en madrass som motsvarar patientens behov. Läs även riktlinjer sängar och antidecubitusmadrasser på vår hemsida;

<https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/>

Valet av madrass baserat på följande faktorer:

- grad av immobilitet och inaktivitet
- behov av kontroll av mikroklimat och minskning av skjuv
- längd och vikt på personen
- risk för nya trycksår (nutrition, cirkulation mm)
- antal, svårighetsgrad och lokalisering av trycksår(en).

Val av tryckfördelande madrass bör ske utifrån personens individuella behov baserat på ovan beskrivna faktorer och utifrån hudbedömning och trycksårsklassificering. Tänk teamöverskridande så att alla patientens behov blir tillgodosedda.

En tryckavlastande madrass kan aldrig ersätta lägesändring oavsett till vilken sårkategori den är ämnad, utan är endast kompletterande hjälpmedel och en del i behandlingen. Viktigt att teamarbete förs för bästa behandling.

Läs alltid bruksanvisningen som medföljer madrassen då det står klar och tydlig information om inställning av luft, handcheck av luftmängd, grindhöjder m.m. Viktigt att informera personal/anhörig om att läsa bruksanvisningen.

Handcheck ska alltid göras oavsett madrass, viktigt att läsa leverantörens bruksanvisning angående hur handcheck på aktuell madrass ska utföras.

Undvik att bädda med flera lager (lakan, glidlakan med vätskespär, täcke, filt) mellan patienten och madrass då detta minskar den tryckavlastande effekten av madrassen samt ökar risken för skjuv- och friktionsskada.

Luftmadrasser och kontrollenhet ska alltid fraktas i väska, för att minimera risk för skador på madrassen och kontrollenheten. Betalande kund debiteras för skador som uppkommit i transport pga att väska inte använts. Saknas väska vid retur debiteras enheten för ny väska men även för rengöring/skada på madrass/kontrollenhet.

Vid bokning av hämtning av säng/madrass vore DHC tacksamma om ni innan skulle kunna torka av madrass och kontrollenhet och börja tömning av luft i madrasserna om ni inte hinner packa ned madrass och kontrollenhet i väska.

Det är du som förskrivare som ansvarar för att madrassen är rätt inställd för patienten och informerar/instruerar personalen, detta även om yttre tekniker levererar och monterar. Du behöver åka ut och bedöma om madrassen är rätt monterad/installerad. Du som förskrivare ansvarar för uppföljning men även återlämning. Se till att madrass/kontrollenhet är avtorkad och nedpackad i medföljande väska.

Madrassindelning

Standardmadrass

- **Madrass Solatium** för patient med låg risk för trycksår. Kan förskrivas tillsammans med hemsjukvårdssäng. Skummadrass som ska läggas direkt på sängbotten, kan toppas med bäddmadrass.
- **Bottenmadrass Solatium** för patient med låg risk för trycksår. Bottenmadrass i skum som **ska** användas tillsammans med en bäddmadrass; fiber, skum el luft. Används med fördel för att minska bygghöjd och slippa grindförhöjning om grindar ska användas. **Ersätter bottenmadrass Prima 6**

Förebyggande madrasser för patient med låg risk för trycksår

- **Bäddmadrass Mjukfiber** för patient med låg risk för trycksår. Fiberbäddmadrass som **ska** toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning.
- **Bäddmadrass HFT Sensitive** för patient med låg risk för trycksår som väger under 95kg. Skumbäddmadrass som **ska** toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning. **Ersätter bäddmadrass Solett**

Förebyggande/behandlande madrasser t.o.m. sårkategori 2

- **Bäddmadrass Optimal 5zon** för patient med risk för trycksår eller med redan uppkommet trycksår kategori 1-2. Skumbäddmadrass som **ska** toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning. **Levereras utan väska**
- **Madrass Greenline PLUS/PRO** för patient med risk för trycksår eller med redan uppkommet trycksår kategori 1-2. Skumbäddmadrass som **ska** läggas direkt på sängbotten. **Ersätter Stratum Sense och Dacapo Comfort Plus**

Förebyggande och behandlande madrasser för tyngre brukare (brukarens behov) beställning läggs via konsulent

- **Madrass Dyna Form Mercury** för patienter med medelhög risk för trycksår. Klarar en brukarvikt på max 254kg. Skummadrass som ska läggas direkt på sängbotten. (1a handsval)
- **Madrass Dacapo Ampla** för patienter med medelhög risk för trycksår. Klarar en brukarvikt på max 350kg. Skummadrass som ska läggas direkt på sängbotten. (2a handsval)
- **Madrass MAXX250** för patienter med medelhög risk för trycksår. Klarar en brukarvikt på max 250kg. Skummadrass som ska läggas direkt på sängbotten. (3e handsval)
- **Madrass Optimal 5zon Plus** för patienter med medelhög risk för trycksår. Klarar en brukarvikt på max 300kg. Skummadrass som ska läggas direkt på sängbotten. (4e handsval)

Förebyggande/behandlande madrasser t.o.m. sårkategori 3

- **Bäddmadrass CuroCell S.A.M. PRO CF10** för patient med risk för trycksår eller med redan uppkommet trycksår kategori 3. Statisk luftbäddmadrass som **ska** toppa en madrass eller bottenmadrass. **Denna modell levereras med ett inneröverdrag som ger ökad komfort.** Resår i hörnen för fastsättning.

Äldre varianter av bäddmadrass CuroCell S.A.M PRO kommer ligga i tvingande ersättningskedja med denna modell.

- **Madrass Area Zone** för patient med medelhög risk för trycksår när frekvent lägesändring inte är möjlig. Kan användas som en del i behandlingen upp till och med trycksår kategori 3. Skum/luftmadrass som **ska** läggas direkt på sängbotten. **Ersätter Static Air**

Förebyggande/behandlande madrasser t.o.m. sårkategori 4

- **Bäddmadrass CuroCell CX10** för patient med hög risk för trycksår när frekvent lägesändring inte är möjlig. Kan användas som en del i behandlingen upp till och med trycksår kategori 4. Luftväxlande bäddmadrass som **ska** toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning. **Ska beställas tillsammans med en kontrollenhet antingen A4 eller IQ. Äldre varianter av bäddmadrass CuroCell A4CX10 finns och ska beställas i 1a hand.**
- **Bäddmadrass ROHO** för patient med hög risk för trycksår när frekvent lägesändring inte är möjlig. Kan användas som en del i behandlingen upp till och med trycksår kategori 4. Eller ett ickeklassificerbart trycksår eller misstänkt djup hudskada. Statisk luft bäddmadrass som ska toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning. **Order läggs via konsulent**
- **Madrass CuroCell CX15** för patient med hög risk för trycksår när frekvent lägesändring inte är möjlig. Kan användas som en del i behandlingen upp till och med trycksår kategori 4. Eller ett ickeklassificerbart trycksår eller misstänkt djup hudskada. Växeltrycksmadrass som ska läggas direkt på sängbotten och sättas fast i sängens rörliga delar. **Ska beställas tillsammans med en kontrollenhet antingen A4 eller IQ. Äldre varianter av madrass CuroCell A4CX15/CuroCell 4 PRO finns och ska väljas i 1a hand.**

Standardmadrass Solatium



Foto: Comco

Produktinformation

Madrass patient med låg risk för trycksår. Madrassen **placeras direkt på sängbotten** och levereras med trikåöverdrag och är lämplig att använda i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö och förskrivs framförallt tillsammans med hemsjukvårdssäng. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form.

Hygienöverdrag (tillval) har dragkedja på tre sidor med ett avtagbart madrassfodral som är slitstarkt och avtorkningsbart.

Fakta

Material:	Kallskum 35 kg/m ³
Höjd:	11 cm
Rekommenderad brukarvikt:	0-130 kg
Garanti:	2 år
Rengöring överdrag:	Trikåöverdraget (medföljer) är tvättbart i 60 grader Hygienöverdrag (tillval) är avtorkningsbart med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas.
Leverantör:	Comco
Debiteringsform:	Försäljning

Lagerlagd:

DHCnr 53409 Madrass Solatium 35kg/m³ 90x200x12 inkl trikåöverdrag

DHCnr 53785 Hygienöverdrag 90x200x11 m dragkedja

Beställningsvara:

DHCnr 53410 Madrass Solatium 35kg/m³ 85x200x12 inkl trikåöverdrag

DHCnr 53411 Madrass Solatium 35kg/m³ 105x200x12 inkl trikåöverdrag

DHCnr 53412 Madrass Solatium 35kg/m³ 120x200x12 inkl trikåöverdrag

DHCnr 60274 Hygienöverdrag 85x200x11 m dragkedja

DHCnr 53786 Hygienöverdrag 105x200x11 m dragkedja

DHCnr 53787 Hygienöverdrag 120x200x11 m dragkedja

Bottenmadrass Solatium



Foto: Comco

Produktinformation

Bottenmadrass Solatium är en enkel och funktionell bottenmadrass som **placeras direkt på sängbotten och toppas med bäddmadrass**; av fiber/skum eller luft. Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som är mycket enkel att rengöra och hantera. Det elastiska och följsamma överdraget är ångpermeabelt.

Fakta

Material:	Kallskum 35 kg/m ³
Höjd:	6 cm
Rekommenderad brukarvikt:	0-130 kg
Garanti:	2 år
Rengöring överdrag:	Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas.
Leverantör:	Comco
Debiteringsform:	Försäljning

Lagerlagd:

DHCnr 62579 Bottenmadrass Solatium 90x200x6 inkl hygienöverdrag

Beställningsvara:

DHCnr 62577 Bottenmadrass Solatium 85x200x6 inkl hygienöverdrag

DHCnr 62581 Bottenmadrass Solatium 105x200x6 inkl hygienöverdrag

Bäddmadrass mjukfiber 3-delad



Foto: Comco

Produktinformation

Förebyggande bäddmadrass som läggs ovanpå befintlig madrass till patient med låg risk för att utveckla trycksår. Uppskattad av patient med värk och smärta. Bäddmadrassen består av glatta fibrer som motverkar skjuvning, som sker i bäddmadrassen istället för i patientens egen vävnad. Bäddmadrassen består av tre separata madrassdelar som har ett sammanhängande madrassfodral med tre fickor. Genom att byta plats på sektionerna förlängs madrassens livslängd. Levereras komplett med tygöverdrag. **Resårband finns i hörnen för att kunna fästa bäddmadrassen i befintlig madrass.**

Fakta

Material:	Silikoniserad polyesterhålfiber
Rekommenderad brukarvikt:	0-95kg
Garanti:	2 år
Rengöring:	Bomullsöverdrag: maskintvätt max 90 °C, kan torktumlas. Madrass: maskintvätta max 60 °C, kan torktumlas på låg värme till stryktorr. OBS! Får ej torktumlas i för hög temperatur, då fibrerna i madrassen klumpar ihop sig.
Leverantör:	Comco
Debiteringsform:	Försäljning

Lagerlagd:

DHCnr 56911 Bäddmadrass 90x200 mjukfiber 3-delad

Beställningsvara:

DHCnr 56912 Bäddmadrass 105x200 mjukfiber 3-delad

DHCnr 56913 Bäddmadrass 120x200 mjukfiber 3-delad

Bäddmadrass HFT Sensitive

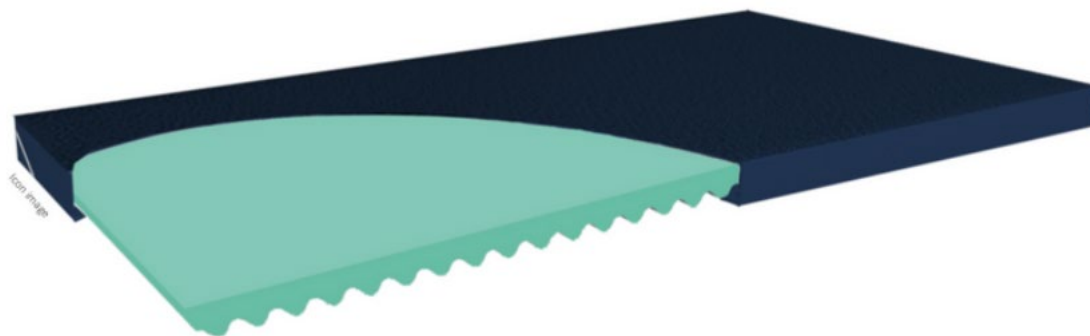


Foto: Palliance

Produktinformation

En förebyggande bäddmadrass och som placeras ovanpå befintlig madrass och används som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med sårkategori 1. Den är speciellt framtagen för lätta och känsliga personer genom att den är extra mjuk och följsam. Hygienöverdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor och är ångpermeabelt vilket minskar risken för hudmaceration. **Resårband finns i hörnen för att kunna fästa bäddmadrassen i befintlig madrass.**

Fakta

Material:	Kallskum PU
Höjd:	7 cm
Rekommenderad brukarvikt:	0-95 kg
Garanti:	2 år
Rengöring:	Desinfektionsmedel, torkdesinfektion med klor eller kemo-termisk rengöring möjlig i enlighet med bruksanvisning..
Leverantör:	Palliance
Debiteringsform:	Försäljning

Lagerlagd:

DHCnr 62555 Bäddmadrass HFT Sensitive 90x200x6 inkl hygienöverdrag

Beställningsvara:

DHCnr 62554 Bäddmadrass HFT Sensitive 85x200x6 inkl hygienöverdrag

Bäddmadrass Optimal 5zon



Foto: Care of Sweden

Produktinformation

En förebyggande bäddmadrass och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med sårkategori 2. **Den läggs ovanpå befintlig madrass och har resårband i hörnen för att fästa mot undermadrassen.** Madrassen är sågad i kuber för att ge god tryckutjämning. Madrassen är speciellt tillverkad för att minimera påverkan av skjuv- och friktionskrafter. Levereras med ett vätsketätt hygienöverdrag som är ångapermeabelt.

OBSERVERA ATT DEN FROM 1/10 LEVERERAS UTAN VÄSKA

Fakta

Material:	Kallskum 65 kg/m ³
Höjd:	6 cm
Rekommenderad brukarvikt:	0-150 kg
Garanti:	2 år
Rengöring överdrag:	Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas.
Leverantör:	Care of Sweden
Debiteringsform:	Försäljning

Lagerlagd:

DHCnr 62541 Bäddmadrass Optimal 5zon 90x200x6 inkl hygienöverdrag u väska

Beställningsvara:

DHCnr 62539 Bäddmadrass Optimal 5zon 85x200x6 inkl hygienöverdrag u väska

DHCnr 39355 Bäddmadrass Optimal 5zon 105x200x6 inkl hygienöverdrag u väska

DHCnr 39618 Bäddmadrass Optimal 5zon 120x200x6 inkl hygienöverdrag u väska

TIPS!

Överväg om det är bättre att beställa en madrass istället för en standardmadrass + bäddmadrass eller bottenmadrass + bäddmadrass. (Bäddmadrass kan ju glida på en madrass/bottenmadrass)

Madrass Greenline PLUS/PRO



Foto: Palliance

Produktinformation

Madrass Greenline PLUS/PRO en högkvalitativ ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten. Den kan hantera brukarvikter mellan 0 - 140 kg och har 5 års garanti är en trycksårspåbyggande madrass som understödjer behandling av trycksår kategori 2. Försedd med avtorkningsbart hygienöverdrag med bärhandtag och droppskyddad dragkedja på tre sidor. Eller avtorkningsbart evakueringsöverdrag med droppskyddad dragkedja med evakueringsfunktion.

Fakta

Material:	PU skum
Höjd:	14 cm
Rekommenderad brukarvikt:	0-140kg
Garanti:	5 år
Rengöring överdrag:	Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas.
Leverantör:	Palliance
Debiteringsform:	Försäljning

Lagerlagd:

DHCnr 62742 Madrass Greenline PLUS/PRO 90x200x14 inkl hygienöverdrag

Beställningsvara:

DHCnr 62740 Madrass Greenline PLUS/PRO 85x200x14 inkl hygienöverdrag

DHCnr 62744 Madrass Greenline PLUS/PRO 105x200x14 inkl hygienöverdrag

DHCnr 62754 Madrass Greenline PLUS/PRO 85x200x14 m evakueringsöverdrag

DHCnr 62756 Madrass Greenline PLUS/PRO 90x200x14 m evakueringsöverdrag

DHCnr 62758 Madrass Greenline PLUS/PRO 105x200x14 m evakueringsöverdrag

Tidigare modeller i detta objekt: Optimal 5zon, Dacapo Comfort Plus, Stratum Sens

Madrasser för tyngre brukare, 4 olika modeller där det billigaste alternativet ska väljas i första hand. Skummadrasser som ska läggas direkt på sängbotten och det levereras inkl hygienöverdrag.

Madrass Dyna Form Mercury

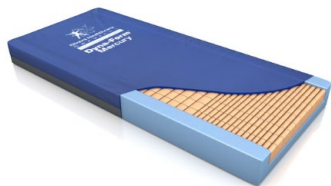


Foto: DirectHealthcareGroup

Dyna-Form Mercury -madrassen är särskilt utformad för att förebygga och reducera trycksår. Den här produkten består av en specialtillverkad, profilerad skumblandning av högkvalitativt CME-skum (Combustion Modified Ether) och tillhandahåller inte bara de bästa egenskaperna för tryckfördelning utan även god komfort och lång produktlivslängd. Konstruktionen med sidoväggar möjliggör stabilitet vid förflyttning av patienten.

Fakta

Rekommenderad brukarvikt:	0-254 kg
Garanti:	Skum 8 år/ hygienöverdrag 4år
Leverantör:	Direct Healthcare Group (DHG)
Debiteringsform:	Försäljning
Produktblad	https://www.directhealthcaregroup.com/app/uploads/Objekt-4-Dyna-Form-Mercury_Produktblad-1.pdf

Beställningsvara:

DHCnr 62565 Madrass Dyna Form Mercury 105x200x15 inkl hygienöverdrag

DHCnr 62566 Madrass Dyna Form Mercury 120x200x15 inkl hygienöverdrag

Madrass Dacapo Ampla

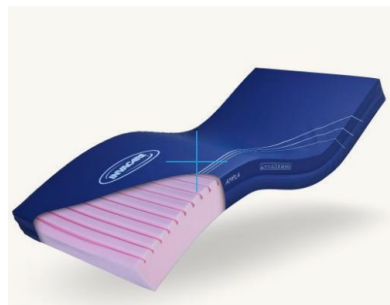


Foto Invacare

Dacapo Ampla är en profilerad en skummadrass i ett skikt som består av ett högspecifikt skum. Modellens unika profilering anpassar sig till kroppen och ökar därmed kontaktytan med huden, för att minimera skjuvning och yttryck med enastående tryckomfördelning.

Fakta

Rekommenderad brukarvikt:	0-350 kg
Garanti:	Skum 2 år/ hygienöverdrag 1år
Leverantör:	Invacare
Debiteringsform:	Försäljning
Produktblad:	https://www.invacare.se/sites/se/files/csv_migration/product_docs/sales_docs/DSAL010540_ProduktbladNYADacapoMadrasser.pdf

Beställningsvara:

DHCnr 62543 Madrass Dacapo Ampla 103x200x15 inkl hygienöverdrag

DHCnr 62544 Madrass Dacapo Ampla 120x200x15 inkl hygienöverdrag

Madrass MAXX 250 Greenline



Foto:Palliance

En högkvalitativ ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten. Den kan hantera brukarvikter mellan 0 – 250 kg

Fakta

Rekommenderad brukarvikt:	0-250 kg
Garanti:	Skum 7 år/ hygienöverdrag 2år
Leverantör:	Palliance
Debiteringsform:	Försäljning
Produktblad:	https://palliance.se/media/Produktdatablad-MAXX-250-GREENLINE-1.pdf

Beställningsvara:

DHCnr 62558 Madrass MAXX 250 Greenline 105x200x18 inkl hygienöverdrag

DHCnr 62559 Madrass MAXX 250 Greenline 120x200x18 inkl hygienöverdrag

Madrass Optimal 5zon PLUS

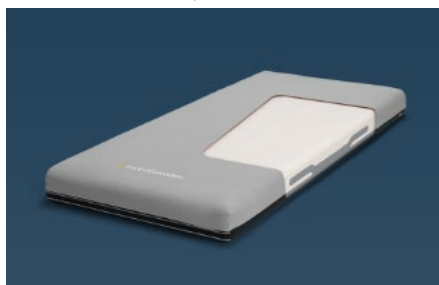


Foto: Care of Sweden

Optimal 5zon Plus är utvecklad för att upprätthålla livskvalitet för individer som tillbringar mycket tid i vårdbädden och samtidigt bidra till att minska risken för trycksår. Genom vår patenterade stödfunktion DuoCore och en tvådelad, strumpad skumkärna, bidrar madrassen till att minska påverkan av skjuvkrafter samt bibehålla en bekväm och stabil sittposition, bekväm och stabil sittposition.

Fakta

Rekommenderad brukarvikt:	0-300 kg
Garanti:	Skum 2 år/ hygienöverdrag 1år
Leverantör:	Care of Sweden
Debiteringsform:	Försäljning
Produktblad:	https://www.careofsweden.se/wp-content/uploads/2024/05/Produktblad_Optimal_5zon_Plus_SV_240523.pdf

Beställningsvara:

DHCnr 50958 Madrass Optimal 5zon Plus 105x200x15 inkl hygienöverdrag

DHCnr 50556 Madrass Optimal 5zon Plus 120x200x15 inkl hygienöverdrag

Bäddmadrass CuroCell S.A.M. PRO CF10



Foto: Care of Sweden

Produktinformation

CuroCell S.A.M. PRO CF10 är en bäddmadrass med effektiv tryckfördelning genom konstant lågt tryck som används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 3.

Kontrollenheten/pumpen har komfortreglage gör det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att CuroCell S.A.M. PRO kan användas under lång tid och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller vald tryck- och komfortnivå vilket innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs. Detta minimerar ljud och vibrationer samt bidrar till en lång livslängd och låg energiförbrukning för pumpen. CuroCell S.A.M. PRO levereras med ett hygienöverdrag som är ångpermeabelt vilket minskar risken för hudmaceration. Ej hälfunktion. **Resårband finns i hörnen för att kunna fästa bäddmadrassen i befintlig madrass.**

Madrassen och pump ska alltid fraktas i medföljande väska.

Fakta

Höjd:	10 cm
Rekommenderad brukarvikt:	0-250 kg
Garanti:	2 år
Rengöring:	Överdrag: Avtorkning med ljummet vatten och tvållösning alt. med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas. Kontrollenhet: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
Leverantör:	Care of Sweden
Debiteringsform:	Hyra

Äldre versioner av CuroCell S.A.M. utgår ur sortimentet men så länge de finns kvar i rekondsnurran kommer de ligga i tvingande ersättningsgrupp med nya versionen. Detta innebär att när äldre versioner finns på lager, så går dessa ut först.

TIPS! Larmar kontrollenheten till AUTO420/A4/IQ ofta kan denna modell av kontrollenhet/madrass vara ett alternativ. Denna kontrollenhet arbetar även aktivt max 15 minuter dygnet.

Madrass AREA ZONE

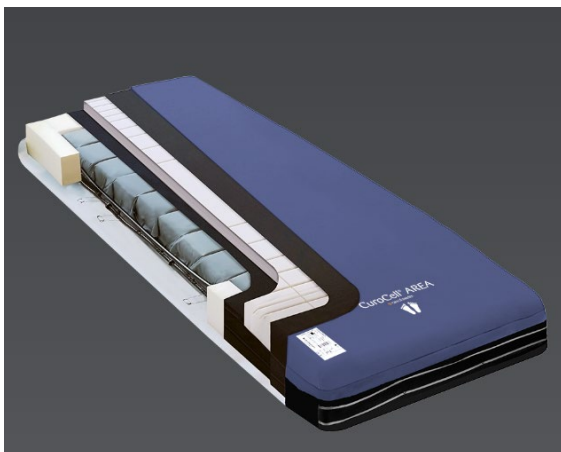


Foto: Care of Sweden

Produktinformation

AREA ZONE Air är en kombinationsmadrass av luft och skum, **läggs direkt på sängbotten** och används i förebyggande och behandlande syfte upp till sårkategori 3. Madrassen innehåller nio luftceller som är uppdelade i zoner och som anpassar sig till individen och ger en individuell inställning. Madrassen är självinställande och det behövs ingen elektrisk kontrollenhet.

Madrassen levereras med elastiskt överdrag med droppkant.

Innan madrassen används första gången ska madrassen läggas plant i minst 2 timmar. OBS! Läs noggrant bruksanvisningen om hur luftsystemet aktiveras.

Fakta

Höjd:	18 cm
Rekommenderad brukarvikt:	0-230 kg
Garanti:	5 år
Rengöring överdrag:	Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 85°C, kan torktumlas max 75°. Överdraget måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka på madrassen.
Leverantör:	Care of Sweden
Debiteringsform:	Försäljning

Lagerlagd:

DHCnr 62788 Madrass CuroCell AREA Zone 90x200x18 inkl hygienöverdrag

Beställningsvara:

DHCnr 62786 Madrass CuroCell AREA Zone 85x200x18 inkl hygienöverdrag

DHCnr 62790 Madrass CuroCell AREA Zone 105x200x18 inkl hygienöverdrag

DHCnr 62792 Madrass CuroCell AREA Zone 120x200x18 inkl hygienöverdrag

TIPS! Ett alternativ till patient som inte klarar av ljud från kontrollenhet

Bäddmadrass CuroCell CX10



Foto: Care of Sweden

Produktinformation

Bäddmadrass CuroCell CX10 är en luftmadrass som används för förebyggande och behandlande syfte upp till sårkategori 4. Det är en bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass och den är utvecklad för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat. Hälfunktion finns i form av att de 6 nedersta cellerna är lägre. Alla celler ingår i luftväxlingen. En funktion för utsugning av luft inför nedpackning finns.

Resårband finns i hörnen för att kunna fästa bäddmadrassen i befintlig madrass. Till denna madrass väljer man sedan en kontrollenhet A4 eller IQ, se sidan 18

Madrasen och pump ska alltid fraktas i medföljande väska.

Fakta

Höjd:	10 cm
Rekommenderad brukarvikt:	0-200 kg
Garanti:	2 år
Rengöring:	Överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95°C, kan torktumlas. Kontrollenhet: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
Leverantör:	Care of Sweden
Debiteringsform:	Hyra

DHCnr 62827 Bäddmadrass CuroCell CX10 90x200x10 inkl hygienöverdrag o väska exkl kontrollenhet

DHCnr 62826 Bäddmadrass CuroCellA4 CX10 85x200x10 inkl hygienöverdrag o väska exkl kontrollenhet

DHCnr 62828 Bäddmadrass CuroCellA4 CX10 105x200x10 inkl hygienöverdrag o väska exkl kontrollenhet.

DHCnr 62832 Kontrollenhet CuroCell A4

DHCnr 62833 Kontrollenhet CuroCell IQ

Bäddmadrass CuroCell A4 CX10 komplett system ska väljas i 1a hand.

Bäddmadrass ROHO



Foto: Permobil

OBSERVERA! DENNA MADRASS KAN INTE BESTÄLLAS VIA KUNDSERVICE UTAN ENDAST VIA KONSULENT

Produktinformation

Bäddmadrass Roho består av fyra separata sektioner som kan justeras oberoende av varandra och bidra till konstant lågt tryck under hela kroppen. Bäddmadrassen har ingen elektrisk luftpump. Vid behov kan enskild del bytas ut mot skumsektion, mått per sektion är 86x49 cm. Madrassen levereras med vätsketätt överdrag och handchecks-handske.

Fakta

<i>Material:</i>	<i>Neoprenceller 10x18 st/sektion</i>
<i>Höjd:</i>	<i>8,5 cm</i>
<i>Rekommenderad brukarvikt:</i>	<i>Ingen viktgräns men storleken måste passa patienten</i>
<i>Garanti:</i>	<i>2 år</i>
<i>Rengöring:</i>	<i>Överdrag: Maskintvätt max 60°C, kan torktumlas på låg temp. Madrass: <u>Ventilerna måste vara stängda vid rengöring!</u> Madrassdel läggs i vatten och rengörs med mjuk borste eller trasa. För desinfektion kan madrassdel ligga i vatten med desinfektionsmedel i 10 min efter diskning, sköjs noggrant och lufttorkas.</i>
<i>Leverantör:</i>	<i>Permobil</i>
<i>Debiteringsform:</i>	<i>Hyra</i>

Beställningsvara:

DHCnr 57608 Bäddmadrass Roho 86x190,5x8,5 inkl handpump och handcheckhandske

Madrass CuroCell CX15



Foto: Care of Sweden

Produktinformation

Madrass CuroCell CX15 är en luftmadrass som **läggs direkt på sängbotten** och som används i förebyggande och behandlande syfte upp till sårkategori 4 samt oklassificerade trycksår. Det är en madrass och är utvecklad för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat. Hälfunktion finns i form av att de 6 nedersta cellerna är lägre. De två översta cellerna ingår inte i luftväxlingen. Luften recirkulerar för att undvika nedkylning.

Till denna madrass väljer man sedan en kontrollenhet A4 eller IQ, se sidan 18.

Madrass och kontrollenhet ska alltid fraktas i medföljande väska.

Fakta

Höjd:	15 cm
Rekommenderad brukarvikt:	0-200 kg
Garanti:	2 år
Rengöring:	Överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas. Kontrollenhet: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
Leverantör:	Care of Sweden
Debiteringsform:	Hyra

DHCnr 62830 Madrass CuroCell A4 CX15 90x200x15 inkl hygienöverdrag, lakanshållare o väska exkl kontrollenhet

DHCnr 62829 Madrass CuroCell A4 CX15 85x200x15 inkl hygienöverdrag, lakanshållare o väska exkl kontrollenhet

DHCnr 62831 Madrass CuroCell A4 CX15 105x200x15 inkl hygienöverdrag, lakanshållare o väska exkl kontrollenhet

DHCnr 62832 Kontrollenhet CuroCell A4

DHCnr 62833 Kontrollenhet CuroCell IQ

Madrass CuroCell4 PRO/AUTO420/A4 utgår ur sortimentet men kommer finnas i rekondsurrar och de ska väljas i första hand. De finns i webSesam.

Kontrollenhet A4



CuroCell® A4 är ett system som ställer in lufttrycket i madrassen utifrån patientens längd, vikt och position utan behov av manuella inställningar. Det finns tre program att välja på: Konstant lågt tryck innebär att luftfyllnadstrycket i alla luftceller är detsamma i hela madrassen. Alternierande funktion innebär att luftfyllnadstrycket i luftcellerna är olika och växlar regelbundet efter förbestämda cykler. Pulsation kombinerar konstant lågt tryck med alternierande funktion. Välj program genom att trycka på knappen för respektive program. Vi rekommenderar det pulserande läget vilket också är förinställt

Kontrollenhet IQ



CuroCell® IQ är ett system som väger patienten och anpassar trycket efter patientens vikt. Det är inte möjligt att själv välja program och komfort. Pulserande läge med en cykeltid på 10 minuter är förvalt.

DHCnr 62832 Kontrollenhet CuroCell A4

DHCnr 62833 Kontrollenhet CuroCell IQ

Benämningar:

Evakueringsöverdrag är ett hygienöverdrag med evakueringsfunktion. Det vill säga att man vid eventuell evakuering kan låta personen ligga kvar på madrassen och med överdragets hjälp evakuera. Viktigt att innan dokumentera vilka personer som har sådana överdrag.

Distanstyg/inneröverdrag är ett tjockare tyg som ligger mellan överdraget och luftcellerna för att öka komforten.

Kontrollenhet är den enhet som tillför luft till luftmadrasserna.

Bäddmadrass menas en tunnare madrass som **läggs uppe på befintlig madrass/bottenmadrass el resårmadrass**. Bäddmadrassen har resårband i varje hörn för festsättning i befintlig madrass/bottenmadrass. Bedömning av underliggande madrass måste alltid göras för att funktionen av bäddmadrassen ska fungera som tänkt. Viktigt att se över grindhöjden om grind bedömts ska användas vid användning av högre madrasser.

Madrass menas att den ska läggas direkt på sängbotten. Denna madrass **ska ersätta alla andra madrasser**. Kan inte placeras på resårmadrass pga att risken att den glider mot resårmadrassen. Vid placering i hemsjukvårdssäng får madrassen endast sättas fast i sängens rörliga delar annars kommer madrassen gå sönder.

Bottenmadrass menas att den ska läggas direkt på sängbotten och toppas med en bäddmadrass. Denna madrass är tunnare och **måste kombineras** med en bäddmadrass fiber/skum/luft.