

Sortiment Medicinska Behandlingshjälpmedel

Vägledning vid förskrivning av

Andningshjälpmedel:

- APAP/CPAP
- BiPAP/ BiLevel
- Ventilator (Hemrespirator)
- Aktiv befuktare för ventilator
- Högflödesbefuktare

Datum 2024-05-06	Diarienummer	I samarbete med
Giltigt t.o.m 2027-05-06	Versionsnummer 1.0	
Godkänt av Anteskog Carina /Hjälpmedel Dalarna /Borlänge		



Innehåll

1	Kontaktuppgifter, Avgifter, Återlämning, Policy.....	4
2	Vägledning vid förskrivning av APAP	5
3	APAP Luftpump vid Sömnapné - hjälpmedel och tillbehör.....	6
3.1	AirSense 10 AutoSet Tri-pack Art nr: 558 83	6
3.2	AirSense 10 AutoSet for her Tri-pack Arnr: 571 93.....	6
3.3	AirSense 11 AutoSet Tri-pack Art nr: 595 91	6
3.4	Tillbehör AirSense 10 AutoSet Tri-pack / For her Tri-pack.....	7
3.5	Tillbehör AirSense 11	8
3.6	DreamStation Auto Art nr: 55882.....	9
3.7	Tillbehör DreamStation Auto	9
4	Vägledning vid förskrivning av BiPAP/Bi-Level.....	10
5	BiPAP / Bi-Level	11
5.1	BiPAP DreamStation AVAPS Art nr: 559 00	11
5.2	Tillbehör DreamStation Auto	11
5.3	AirCurve 10 VAuto Art nr: 500 91	12
5.4	AirCurve 10 CS PaceWave Tri-pack Art nr: 589 15	12
5.5	A40 Pro Art nr: 583 50.....	13
5.6	Tillbehör A40 Pro.....	13
5.7	Enkel Lumis 100 VPAP S Art nr: 496 34.....	14
5.8	Enkel Lumis 100 ST Art nr: 509 95.....	14
5.9	Enkel Lumis 150 VPAP ST-A Art nr: 588 58 & Art nr: 567 50 (engelsk display)	14
5.10	Tillbehör Lumis	15
5.11	Vivo 3 Art nr: 587 86	16
5.12	Tillbehör Vivo 3.....	16
5.13	Vivo 45 Art nr: 562 68, Vivo 45LS Art nr: 60681.....	17
5.14	Tillbehör Vivo 45	17
6	Vägledning vid förskrivning av Ventilator (Hemrespirator)	18
7	Ventilator (Hemrespirator).....	19
7.1	Vivo 50 Art nr: 455 32.....	19
7.2	Vivo 60 Art nr: 503 54.....	19
7.3	Tillbehör Vivo 50 och 60	19
7.4	Trilogy Evo Art nr: 576 82	20
7.5	Tillbehör Trilogy Evo.....	20
8	Aktiv befuktare till ventilator	20
8.1	Aircon gen 2	20
8.2	MR850 Art.nr. 318 97 och MR810 Art.nr. 56835	21

8.3	Tillbehör MR 850 och MR 810	21
9	Högflödesbefuktare.....	22
9.1	MyAirvo2 Art.nr. 45314	22
9.2	Tillbehör MyAirvo 2.....	22

1 Kontaktuppgifter, Avgifter, Återlämning, Policy

Dalarnas Hjälpmedelscenter Kundservice Beställning, Felanmälan, Rådgivning	0243 - 49 78 70 Tele Q
APAP/CPAP Bokning service, Beställning masker, Felanmälan, Rådgivning	0243 - 49 78 65 Tele Q
Sömnlaboratoriet Avesta	0226 - 49 61 37
Lungmottagning Falun	023 - 49 25 27
Syrgassköterska Falun Apotek, beställning av Syrgastuber	023 - 49 20 22 0771- 450 450 val 1-3
Respiratorsköterska Falun	023 - 49 28 95

Återlämning av Hjälpmedel

[Frågor och svar om hjälpmedel - Region Dalarna](#)

Kostnadsansvar

Förskrivning av hjälpmedel är en integrerad del i hälso- och sjukvårdens processer, där hjälpmedlet ska kompensera för en persons aktivitetsbegränsningar, underlätta behandling eller förebygga komplikationer.

Hjälpmedel ska inte ersätta en rehabiliterings- eller habiliteringsinsats.

Förskrivaren betalar, uppföljningsansvarig är kostnadsansvarig. Förskrivaren står för eventuella re ordinationer (flergångs- och flerårsförskrivning) under hela re ordinationsperioden (gäller Ortopedtekniska hjälpmedel och Hårsättning)

Hjälpmedel förskrivna av Läkare- och/eller Logoped är alltid regionens hela ansvar.

Hjälpmedelsavgift

Patienten/brukaren betalar en hjälpmedelsavgift per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet, sedan hjälpmedelsavgift för varje ytterligare hjälpmedel och för kompletterande tillbehör vid nya bedömningar.

Hjälpmedelsavgiften ingår under högkostnadsskyddet

Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift för inkontinenshjälpmedel, hjälpmedel som omfattas av maxbidraget dvs peruker, toupéer, glasögon och kontaktlinser, ej heller för förbrukningsartiklar och reservdelar. Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift om han/hon är inskriven i sluten vård eller avancerad hemsjukvård men däremot om det finns ett fortsatt behov av hjälpmedlet efter den inskrivna perioden. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen hjälpmedelsavgift.

Hjälpmedelspolicy, Rehabilitering habilitering och hjälpmedel

[Policy vid förskrivning av hjälpmedel i Dalarna återfinns på denna sida](#)
[Rehabilitering habilitering och hjälpmedel inklusive hantering av kostnader](#)

2 Vägledning vid förskrivning av APAP

Förskrivare	Remiss från Allmänläkare till Sömnlaboratoriet i Avesta
Kriterier	Brukare med obstruktiv sömnapné. Onormal trötthet p.g.a snarkning
Mål med hjälpmedlet	Minska antalet apnéer. Minskning av onormal trötthet
Utprovningsrutiner	Enligt rutin på förskrivande klinik. Dagutprovning Nattutprovning Förskrivaren upprättar Låneförbindelsen/Lån av samhällsägt Hjälpmedel
Uppföljning	Enligt rutin på förskrivande klinik
Brukarens ansvar	Följa förskrivarens råd om leverantörens bruksanvisning. Brukaren betalar Hjälpmedelsavgift Brukaren betalar avgift för masker & tillbehör
Dubbel förskrivning	Nej, önskar brukaren en extra maskin kan den inhandlas av brukaren själv hos leverantör. Intyg från Sömnlab krävs
DHC:s ansvar	Avhjälpande underhåll
Tillbehör:	Beställs av förskrivare via Dalarnas Hjälpmedelscenter
Förbrukningsartiklar Avgifter	Beställs av brukare på Dalarnas Hjälpmedelscenter Brukaren betalar ett subventionerat pris för masker och maskdelar
Kostnadsansvar	Sömnlaboratoriet Avesta
Brukare inflyttad från annan region	Remiss från tidigare hemlandsting till Sömnlab Avesta.
Kommentar:	APAP ska inte förskrivas på hjälpmedelskort. Brukare har möjlighet att köpa mskin direkt hos leverantör. Intyg krävs från sömnlab.

3 APAP Luftpump vid Sömnapné - hjälpmedel och tillbehör

3.1 AirSense 10 AutoSet Tri-pack Art nr: 558 83

Leverantör: www.resmed.se



UPPHANDLAD

Automatisk flödesgenerator APAP med Autotitiering för tryckstödsbehandling av patienter med obstruktiv sömnapné (OSA)

Levereras komplett i väska med bruksanvisning, befuktare, slang, minneskort, nätadapter & luftfilter 2st

[Instruktionsfilm om AirSense 10](#)

[Instruktionsfilm om rengöring AirSense 10](#)

3.2 AirSense 10 AutoSet for her Tri-pack Artnr: 571 93

Leverantör: www.resmed.se



UPPHANDLAD

Automatisk flödesgenerator APAP med Autotitiering för tryckstödsbehandling av patienter med obstruktiv sömnapné (OSA)

Levereras komplett i väska med bruksanvisning, befuktare, slang, minneskort, nätadapter & luftfilter 2st

3.3 AirSense 11 AutoSet Tri-pack Art nr: 595 91










Leverantör: www.resmed.se









UPPHANDLAD

APAP AirSense 11 Tri-pack, APAP med befuktare, uppvärmd slang (Climate LineAir), Power Supply, väska, SD-kort, kuvert till SD-kort. 1 filter i apparaten, 2-pack filter, bruksanvisning, snabbguid

3.4 Tillbehör AirSense 10 AutoSet Tri-pack / For her Tri-pack

		Artikelnummer
	DC - DC Omvandlare 12V/24V 90W Kabel	476 65
	Befuktare (Vattenbehållare)	476 64
	Sidolock AirSense 10 (Svart) Sidolock AirSense 10 For Her/AirCurve (Ljusgrått)	476 66 578 07
	Slang ClimateLine Air	476 63
	Luftslang Slimline 15mm, 2m	423 65
	Allergifilter 2-pack, byts ca 1 gång / mån. Hypoallergifilter som passar till Air 10/S9 CPAP/APAP/VPAP	423 33
	Luftfilter, byts 2-3 gång / år. Standard filter som passar till Air10/S9 CPAP/APAP/VPAP	423 68
	Knärör till AirSense Vinklad knärörsadapater 90 grader att koppla mellan apparatens luftutblås och till exempel en vanlig rak slang så som SlimLine.	496 29
	Nätadapter	476 69

3.5 Tillbehör AirSense 11

		Artikelnummer
	Vattenbehållare AirSense 11	595 83
	Sidoskydd AirSense 11	595 88
	Slang AirSense 11 ClimateLine Air Uppvärmad	595 82
	Allergifilter Airsense 11 2 pack	604 78
	Lufffilter Standard	595 90
	Nätadapter AirSense 11 65W	595 84
Bild saknas	Minneskort SD AirSense 10/11 Lumis	595 89

3.6 DreamStation Auto Art nr: 55882

 Leverantör: Medidyne <http://www.medidyne.se>


UTGÅTT

APAP Dreamstation Auto levereras i bärväska med bruksanvisning, 1st filter, 10st pollenfilter, befuktare, uppvärmd slang, GSM-modem, minneskort och nätadapter

[Bruksanvisning:](#)

3.7 Tillbehör DreamStation Auto

		Artikelnummer
	Nätadapter 80W (OBS! Grönmärkt CPAP-strömkontakt. Passar ej till System One 60-Serien)	558 88
	Befuktare Uppvärm	558 86
	12V Kabel OBS! Grönmärkt CPAP strömkontakt. (Passar ej till System One 60-Serien.)	558 85
	Filter Dreamstation ultrafint engångs 6-pack	558 95
	Pollenfilter Dreamstation återanvändbart 1-pack	558 97
	Slang Dreamstation 15mm 183cm uppvärmd	558 90
	Slang Dreamstation 22mm 183cm standard grå	558 91

4 Vägledning vid förskrivning av BiPAP/Bi-Level

Förskrivare	Läkare inom Lungmedicin, Läkare vid Sömnlaboratoriet Avesta samt Läkare vid Barnklinik.
Kriterier	Brukare med obstruktiv sömnapné, eller med underventilationstillstånd
Mål med hjälpmedlet	Minskat antal apnéer. Förbättrad ventilation.
Utprovningsrutiner	Rutiner skall finnas på förskrivande klinik. Sömnlab / Lungsektionen Falu lasarett Utprovning kan ske i samråd med Medicintekniker. Det åligger förskrivare/utprovare att informera brukaren om handhavanderutiner Förskrivaren upprättar Låneförbindelse/Lån av Samhällsägt Hjälpmedel
Uppföljning	Enligt rutin på förskrivande klinik
Brukarens ansvar	Följa förskrivarens instruktion och leverantörens bruksanvisning Brukaren betalar Hjälpmedelsavgift
Dubbel förskrivning	Nej
DHC:s ansvar	Avhjälpande underhåll (Förebyggande underhåll beroende på apparattyp)
Tillbehör	Förskrivaren beställer på Dalarnas Hjälpmedelscenter
Förbrukningsartiklar	Patienten beställer på Dalarnas Hjälpmedelscenter, mask ingår i hyran
Kostnads Ansvar	Förskrivande enhet
Kommentar	Väg till Lungsektionens sida: Sök: Intra/arbetsrum/Medicin Falun/Lung och allergi mottagning Falun/hemrespiratormottagningen. Gäller internt Region Dalarna.

5 BiPAP / Bi-Level

5.1 BiPAP DreamStation AVAPS Art nr: 559 00

 Leverantör: Medidyne <http://www.medidyne.se>


UPPHANDLAD

BiPAP Dreamstation AVAPS levereras i bärväska med bruksanvisning, 1st filter, 10st pollenfilter, befuktare, uppvärmd slang, GSM-modem, minneskort och nätadapter

[Bruksanvisning:](#)

5.2 Tillbehör DreamStation Auto

		Artikelnummer
	Nätadapter 80W (OBS! Grönmärkt CPAP-strömkontakt. Passar ej till System One 60-Serien)	558 88
	Befuktare Uppvärmd	558 86
	12V Kabel OBS! Grönmärkt CPAP strömkontakt. (Passar ej till System One 60-Serien.)	558 85
Bild saknas	Filter Dreamstation ultrafint engångs 6-pack	558 95
Bild saknas	Pollenfilter Dreamstation återanvändbart 1-pack	558 97
Bild saknas	Slang Dreamstation 15mm, längd 183 cm uppvärmd	558 90
Bild saknas	Slang CPAP 22mm, längd 1,8 m standard grå	142 11

5.3 AirCurve 10 VAuto Art nr: 500 91

Leverantör: www.resmed.se



UPPHANDLAD

Avsedd för behandling av obstruktiv sömnapné (OSA) hos patienter som väger mer än 30 kg. Avsedd för användning i hemmet och på sjukhus

Levereras komplett i väska med bruksanvisning, sidolock, slimline slang, minneskort, nätadapter & luftfilter 2st

[Bruksanvisning:](#)

5.4 AirCurve 10 CS PaceWave Tri-pack Art nr: 589 15

Leverantör: www.resmed.se



UPPHANDLAD

Avsedd att stabilisera ventilationen hos vuxna patienter som uppvisar central sömnapné (CSA), blandad sömnapné, periodisk andning eller Cheyne-Stokes andning (Cheyne Stokes Respiration, CSR) som kan, men behöver inte, vara förknippad med kronisk hjärtsvikt. Den är avsedd för användning i hemmet och på sjukhus.

Tri-pack inkl. befuktare HumidAir och slang (ClimateLineAir)

Levereras komplett i väska med bruksanvisning, befuktare, klimatslang, minneskort, nätadapter & luftfilter 2st

[Bruksanvisning:](#)

För tillbehör: Se under punkt 4.4 Tillbehör Apap Airsense 10...

5.5 A40 Pro Art nr: 583 50

 Leverantör: Medidyne <http://www.medidyne.se>








Batterimodul ingår i A40 Pro, batteri beställs till, se nedan.

UPPHANDLAD

Philips ventilator Respironics BiPAP A40 Pro Bi-Level ventilator behandlar patienter som har andningsinsufficiens med kliniskt bevisade teknologier AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support), EPAP med AVAPS-AE (Average Volume Assured Pressure Support-Automatic EPAP), Automated Airway Management och Auto-Trak.

[Bruksanvisning:](#)

5.6 Tillbehör A40 Pro

		Artikelnummer
Bild se 5.5 A40 Pro	Batteri	446 72
	Befuktare Inkl uppvärmd slang	586 10
	Vattenbehållare till befuktare	532 72
	Nätadapter	530 64
	Luftfilter 2-pack Tvättbara grå Tvättas 1 gång/vecka, byts 1 gång / år.	382 45
	Finfilter vita engångs, 6 st/fp Bytes 1 gång/mån	38246
	Bärväska	530 66
Bild saknas	Användarväska	530 65

5.7 Enkel Lumis 100 VPAP S

Art nr: 496 34

Leverantör: ResMed Sweden AB www.resmed.se



GENERELL PRISLISTA

avsedd att tillhandahålla noninvasiv ventilation till patienter som väger mer än 13 kg med andningsinsufficiens eller obstruktiv sömnapné (OSA). Den är avsedd för användning i hemmet och på sjukhus.

Levereras komplett i väska med bruksanvisning, sidolock, slang, minneskort, nätadapter & luftfilter 2st

[Bruksanvisning](#)

5.8 Enkel Lumis 100 ST Art nr: 509 95

Leverantör: ResMed Sweden AB www.resmed.se

GENERELL PRISLISTA

Avsedd att tillhandahålla noninvasiv ventilation till patienter som väger mer än 13 kg med andningsinsufficiens eller obstruktiv sömnapné (OSA). Den är avsedd för användning i hemmet och på sjukhus.

Levereras komplett i väska med bruksanvisning, sidolock, slang, minneskort, nätadapter & luftfilter 2st

[Bruksanvisning](#)

5.9 Enkel Lumis 150 VPAP ST-A Art nr: 588 58 & Art nr: 567 50 (engelsk display)

Leverantör: ResMed Sweden AB www.resmed.se

GENERELL PRISLISTA

Avsedd att tillhandahålla noninvasiv ventilation till patienter som väger mer än 13 kg eller mer än 30 kg. iVAPS-funktion med andningsinsufficiens eller obstruktiv sömnapné (OSA). Den är avsedd för användning i hemmet och på sjukhus.

Levereras komplett i väska med bruksanvisning, sidolock, slang, minneskort, nätadapter & luftfilter 2st

[Bruksanvisning](#)

5.10 Tillbehör Lumis

		Artikelnummer
Bild saknas	Nätadapter AirSense 10 AutoSet/AirCurve/Lumis 90W	476 69
Bild saknas	Minneskort AirSense 10/11/Lumis SD-kor	595 89

5.11 Vivo 3 Art nr: 587 86

 Leverantör: Breas Medical AB www.breas.com


GENERELLA PRISLISTA

Tryckventilator med intern spänningskälla som kan ge invasiv eller icke invasiv ventilation vid vård av personer som behöver långvarigt stöd från mekanisk ventilation på grund av andningsinsufficiens eller andningssvikt, med eller utan obstruktiv sömnapné.

Levereras komplett i väska med bruksanvisning, befuktare, slang, minneskort, nätadapter och luftfilter

[Bruksanvisning](#)

[Filmklipp](#)

5.12 Tillbehör Vivo 3

		Artikelnummer
	Nätadapter	587 93
	Värmeelement (till Luftfuktare)	587 92
	Vattenbehållare (till Luftfuktare)	587 89
	Luft-bypass	587 91
	Luftfilter Fin 5-pack (Vitt). Bytes 1 gång/mån	587 87
	Luftfilter Grov 5-pack (Grått) Tvättas 1 gång/vecka, byts 1 gång / år.	587 88
	Patientslang Uppvärmd	587 90
	Luftfuktare komplett (behållare och värmeelement)	59419

5.13 Vivo 45 Art nr: 562 68, Vivo 45LS Art nr: 60681

 Leverantör: Breas Medical AB www.breas.com


45



45LS

GENERELL PRISLISTA

Tryckventilator som kan ge kontinuerligt eller periodiskt ventilationsstöd till patienter som behöver invasiv eller icke-invasiv mekanisk andningshjälp. Vivo 45 kan användas 24 timmar/dygn.

Levereras komplett i väska med bruksanvisning, befuktare, slang, minneskort, nätadapter och luftfilter

[Bruksanvisning Vivo 45LS](#)

[Klinisk Manual Vivo 45](#)

[Filmklipp](#)

5.14 Tillbehör Vivo 45

		Artikelnummer	
		Finfilter vitt Vivo 45 5st/fp Bytes 1 gång/mån	567 16
		Grofilter grått Vivo 45 5st/fp Tvättas 1 gång/vecka, byts 1 gång / år.	567 17
Bild saknas	Uppvärmad slang Vivo 45	594 99	
Bild saknas	Nätadapter Vivo 45	601 68	
Bild saknas	Vattenbehållare Vivo 45	595 00	
	Kylluftfilter 5st/fp. Tvättas 1 gång/vecka, byts 1 gång / år.	567 18	
Bild saknas	Monteringsfäste Vivo 45 till rullstativ.	607 12	

6 Vägledning vid förskrivning av Ventilator (Hemrespirator)

Förskrivningsrutin	Väg till Lungsektionens sida: Sök: Intra/arbetsrum/Medicin Falun/Lung och allergi mottagning Falun/hemrespiratormottagningen. Gäller internt Region Dalarna.
Utprovningsrutin	Lungsektionens sida: Se ovan. Förskrivaren upprättar Låneförbindelse/Lån av Samhällsägt Hjälpmedel
Brukarens ansvar	Följa förskrivarens instruktion/leverantörens bruksanvisningar. Brukaren betalar Hjälpmedelsavgift
Ordination/ Inställning	Länk till Lungsektionens sida: Se ovan Ordination/inställning av respirator ska finnas noterat i Journal på särskilt ordinationsblad. Kopia på aktuell inställning ska finnas hos patient.
Dubbel förskrivning	Ja, vid livsuppehållande behandling.
Trackeostomi- vård	Väg till ÖNH:s Sida: Sök: Intra/arbetsrum/Öron näs och halssjukvård Dalarna
DHC:s ansvar	Vid utlämning av respirator ingår komplett slang och mask om sådan används. Förebyggande samt avhjälpande underhåll.
Tillbehör	Beställs på Dalarnas Hjälpmedelscenter
Förbruknings- artiklar	Vissa förbrukningsartiklar beställs på Dalarnas Hjälpmedelscenter, vissa beställs via Raindance/ Mediq för regionvård & Via OneMed för kommuner. Följ lokala anvisningar.
Kostnadsansvar	Förskrivande klinik

7 Ventilator (Hemrespirator)

7.1 Vivo 50 Art nr: 455 32

 Leverantör: Breas Medical AB www.breas.com

GENERELL PRISLISTA

Vivo 50 med flergångsslangset. Vivo 50 är livsuppehållande ventilator med högkvalitativ teknik, slitstark och förstklassig design. Innefattar vår eSync-teknik och har ett fullt utbud av inställningar inkl. Target volume

7.2 Vivo 60 Art nr: 503 54

 Leverantör: Breas Medical AB www.breas.com


GENERELL PRISLISTA

Den livsuppehållande ventilatorn Vivo 60 är avsedd för barn (>5 kg) och vuxna som behöver säker och behaglig ventilation. Vivo 60 är en tryck- och volymventilator som kan ge kontinuerligt eller periodiskt ventilationsstöd till patienter som behöver invasiv eller ickeinvasiv mekanisk andningshjälp.

Bruksanvisning kan skickas via e-post

7.3 Tillbehör Vivo 50 och 60

Bild saknas		Artikelnummer
"	Slangset(engångs)	Saknas
"	Insats f dubbla slangset (expirationsventil)	501 75
"	Batteri Click-on Li-Ion Vivo 50/60	457 15
"	Kabel till fjärrlarm 10m	507 76
"	Kabel till fjärrlarm 25m	495 69
"	AC/DC Switch kit	552 97
"	Kabel FiO2	501 10
"	Sensor FiO2	501 09

7.4 Trilogy Evo Art nr: 576 82

 Leverantör: Medidyne <http://www.medidyne.se>


UPPHANDLAD

Trilogy är en ventilator klassad för livsuppehållande behandling och ger behandling genom reglering av både trycket och volymen. Enheten kan användas för icke-invasiv eller invasiv ventilation.

OBSERVERA: Partikelfilter ska användas och bytas varje månad

7.5 Tillbehör Trilogy Evo

		Artikelnummer
Bild saknas	Engångsslang Trilogy Evo inkl bakteriefilter	585 94
"	Partikelfilter Trilogy Evo 10 pack	576 92
"	Skumplastfilter	576 91

8 Aktiv befuktare till ventilator

8.1 Aircon gen 2

Leverantör: Pulmicare



UPPHANDLAD

Aktiv respirationsluftbefuktare avsedd för användning i ventilatorkrets. Se mer info i länkar nedan

<https://hjalpmedelstjansten.se/organization/492/agreement/4282722/pricelist/4282723/handle>

8.2 MR850 Art.nr. 318 97 och MR810 Art.nr. 56835

Leverantör: Fisher&Paykel AB



MR850



MR810

GENERELL PRISLISTA







Aktiv respirationsluftbefuktare avsedd för användning i ventilatorkrets.

Se mer info i länkar nedan

<https://cdn.hjm.aws.inera.se/b3d4b63f-8f83-3e85-8de0-7d9d5da9838d/00de783e-b096-3c60-a2c1-cf65d64b8818/Bruksanvisning%20MR850%20SWE.pdf>

<https://cdn.hjm.aws.inera.se/b3d4b63f-8f83-3e85-8de0-7d9d5da9838d/cc6faccc-36ee-35ce-9e49-cd327d7391c6/UI-MR810-185042799%20SV.pdf>

8.3 Tillbehör MR 850 och MR 810

		Artikelnummer
	Slangset RT202 uppvärmt med befuktarkammare till MR850 https://resources.fphcare.com/content/rt202-adult-breathing-circuit-with-mr290-autofeed-chamber-ui-185043708.pdf#page=	475 05
	Flergångskammare till befuktare MR850 och MR810	568 37
	Temperatursond MR850	318 98
	Adapter MR 850 enkel	475 07
	Adapter MR 850 dubbel	578 03
	Uppvärmad slang Evaterm för MR810	568 36

9 Höglödesbefuktare

9.1 MyAirvo2 Art.nr. 45314

Leverantör: Fisher&Paykel AB



UPPHANDLAD

MyAIRVO 2, befuktare för hemsjukvård med integrerad flödesgenerator

Se mer info i länkar nedan

[myAirvo | Fisher & Paykel Healthcare \(fphcare.com\)](https://myairvo.fisherspaykel.com)

Bruksanvisning: https://cdn.hjm.aws.inera.se/b3d4b63f-8f83-3e85-8de0-7d9d5da9838d/dd30aefe-fa45-333b-8735-2a397869a940/MyAirvo2_UL-185045489_revF.pdf

Optiflow Junior 2: [Optiflow Junior 2 Nasal Cannula | Fisher & Paykel Healthcare \(fphcare.com\)](https://www.fisherspaykel.com/optiflow-junior-2-nasal-cannula)

9.2 Tillbehör MyAirvo 2

	Bytesintervallerna gäller användning i hemmiljö.	Artikelnummer
	Slangset uppvärmt med befuktarkammare till MyAirvo2 Byts 1 gång / 2 mån	459 32
	Slangset uppvärmt utan befuktarkammare till MyAirvo2 Byts 1 gång / 2 mån	51997
	Flergångskammare till MyAirvo2 Byts vid behov ca 1 gång / år.	470 31
	Optiflow Junior 2: Byts 1 gång / vecka Näsanslutning stl. L	453 12
	Näsanslutning stl. XL	453 11
	Optiflow Junior 2+: Byts 1 gång / vecka Näsanslutning stl. XXL	605 51
	Wigglepads för Optiflow Junior 2 stl. M/L/XL 20-pack	453 10
	Wigglepads för Optiflow Junior 2+ stl. XXL 20-pack	605 52

	Trachanslutning MyAirvo 2. Byts 1 gång / mån https://cdn.hjm.aws.inera.se/b3d4b63f-8f83-3e85-8de0-7d9d5da9838d/0df2b310-59d4-3a56-b66d-884ae74fcc3e/ui-185048544_OPT970.pdf	45929
	Näsanslutning MyAirvo 2 Vuxen stl. S Byts 1 gång / mån	50866
	Näsanslutning MyAirvo 2 Vuxen stl. M Byts 1 gång / mån	50868
	Näsanslutning MyAirvo 2 Vuxen stl. L Byts 1 gång / mån	50867
	Lufffilter till MyAirvo 2. 2-pack Byts 1 gång / 3 mån	45309