
Standard, förebyggande och behandlande madrasser mot trycksår



Innehåll:

| | |
|---------------------------|------------|
| Sårkategorier | 3 |
| Viktig information | 4 |
| Madrassindelning | 5-6 |

Fakta kring de olika madrasserna:

| | |
|--|-----------|
| Standardmadrass Solatium | 7 |
| Bottenmadrass Prima 6 | 8 |
| Bäddmadrass Comco mjukfiber 3-delad | 9 |
| Bäddmadrass Solett | 10 |
| Bäddmadrass Optimal 5zon | 11 |
| Bäddmadrass CuroCell S.A.M. PRO | 12 |
| Madrass Stratum Sens | 13 |
| Bäddmadrass A4 CX10 | 14 |
| Madrass Static Air | 15 |
| Bäddmadrass Roho | 16 |
| Madrass CuroCell A4 CX15 | 17 |
| | |
| Benämningar | 18 |

Sårkategorier

INTERNATIONELLT KLASSIFIKATIONSSYSTEM FÖR TRYCKSÅR ENLIGT NPUAP/EPUAP

Trycksår är en lokaliserad skada på hud och/eller underliggande vävnad vanligen över benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv. Det finns också ett antal bidragande faktorer som kan relateras till trycksår, men betydelsen av dessa faktorer återstår att undersöka.

Kategori/stadie I: Hudrodnad som inte bleknar vid tryck

Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar vid tryck. Mörkt pigmenterad hud kan sakna detta tecken, men färgen skiljer sig från omkringliggande hudområden. Området kan vara smärtsamt, fast, mjukt, varmare eller kallare än annan hud. Kategori 1 trycksår kan vara svårt att upptäcka hos personer med mörk hudfärg. Kategori 1 trycksår kan indikera att personen är i riskzonen för att utveckla djupare trycksår.

Kategori/stadie II: Delhudsskada

Delhudsskada som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbedd utan fibrinbeläggning. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld eller blodfylld blåsa. Visar sig som ett blankt eller torrt ytligt sår utan fibrinbeläggning eller ytligt hematom. Denna kategori ska inte användas för att beskriva hudflikar, hudskador efter häfta, inkontinensrelaterad dermatit eller maceration.

Kategori/stadie III: Fullhudsskada

Fullhudsskada. Subkutan fett är synligt, men ben, sena eller muskler syns inte. Fibrinbeläggning kan vara synlig men döljer inte skadans djup. Kan inkludera underminering och fistlar. Djupet av ett Kategori 3 trycksår varierar beroende på anatomisk lokalisering. Nästrygg, öra, bakhuvud och malleoler saknar subkutan fettvävnad och Kategori 3 trycksår kan vara ytliga på dessa lokaliseringar. Motsatsen gäller för områden med riklig subkutan fettvävnad som kan utveckla extremt djupa Kategori 3 trycksår. Ben/senor är inte synliga eller palpabla.

Kategori/stadie IV: Djup fullhudsskada

Djup fullhudsskada som involverar ben, sena eller muskel. Fibrin eller nekros kan synas. Ofta förekommer underminering och fistlar. Djupet av Kategori 4 trycksår varierar med anatomisk lokalisering. Exempelvis saknas subkutan fettvävnad på nästrygg, öra, bakhuvud och malleoler och sår på dessa lokaliseringar kan vara ytliga. Kategori 4 trycksår kan involvera muskler och stödjevävnad (t ex fascia, sena, ledkapsel) vilket gör det sannolikt att osteomyelit och osteit uppstår. Blottade ben och muskler är synliga eller direkt palpabla.

Icke klassificerbart trycksår: sårdjup är okänt

Fullhudsskada där sårbotten är täckt av död vävnad/nekros (gul, gulbrun, grön eller brun) och/eller sårskorpa (gulbrun, brun eller svart). Det är inte möjligt att avgöra djupet förrän tillräckligt med nekros och/eller fibrin har tagits bort. Stabil (torr, fast, intakt utan rödhet eller fluktuation) sårskorpa på hämlarna fungerar som kroppens naturliga (biologiska) "plåster" och ska inte avlägsnas.

Misstänkt djup hudskada: sårdjup okänt

Lila eller rödbrunt lokaliserat område med missfärgad intakt hud eller blodfylld blåsa som uppstått på grund av tryck, och/eller skjuv som medfört skada på underliggande vävnad. Området kan upplevas smärtsamt, hårt, mjukt, varmare, och kallare vid jämförelse av intilliggande hud. Djup vävnadsskada kan vara svårt att upptäcka på individer med mörk hudfärg. Såret kan utvecklas vidare och döljas av en tunn sårskorpa. Utvecklingen kan gå fort och involvera ytterligare vävnadslager trots optimal behandling.

Viktig information

Välj en madrass som motsvarar patientens behov. Läs även riktlinjer sängar och antidecubitusmadrasser på vår hemsida.

Valet av madrass baserat på följande faktorer:

- grad av immobilitet och inaktivitet
- behov av kontroll av mikroklimat och minskning av skjuv
- längd och vikt på personen
- risk för nya trycksår (nutrition, cirkulation mm)
- antal, svårighetsgrad och lokalisation av trycksår(en).

Val av tryckfördelande madrass bör ske utifrån personens individuella behov baserat på ovan beskrivna faktorer och utifrån hudbedömning och trycksårsklassificering. Tänk teamöverskridande så att alla patientens behov blir tillgodosedda.

En tryckavlastande madrass kan aldrig ersätta lägesändring oavsett till vilken sårkategori den är ämnad, utan är endast kompletterande hjälpmedel och en del i behandlingen. Viktigt att teamarbete förs för bästa behandling.

Läs alltid bruksanvisningen som medföljer madrassen då det står klar och tydlig information om inställning av luft, handcheck av luftmängd, grindhöjder m.m. Viktigt att informera personal/anhörig om att läsa bruksanvisningen.

Handcheck ska alltid göras oavsett madrass, viktigt att läsa leverantörens bruksanvisning angående hur handcheck på aktuell madrass ska utföras.

Undvik att bädda med flera lager (lakan, glidlakan med vätskespärr, täcke, filt) mellan patienten och madrass då detta minskar den tryckavlastande effekten av madrassen samt ökar risken för skjuv- och friktionsskada.

Luftmadrasser och kompressorer ska alltid fraktas i väska, för att minimera risk för skador på madrassen och kompressorn. Enheten debiteras för skador som uppkommit i transport pga att väska inte använts. Saknas väska vid retur debiteras enheten för ny väska men även för rengöring/skada på madrass/kompressor.

Vid bokning av hämtning av säng/madrass vore DHC tacksamma om ni innan skulle kunna torka av madrass och pump och börja tömning av luft i madrasserna om ni inte hinner packa ned madrass och pump i väska.

Madrassindelning

Standardmadrass

- **Standardmadrass Solatium** för patient med låg risk för trycksår. Kan förskrivas tillsammans med hemsjukvårdssäng. Skummadrass som ska läggas direkt på sängbotten, kan toppas med bäddmadrass.
DHCnr 53410 Madrass Solatium 35kg/m³ 85x200x12 inkl trikåöverdrag
DHCnr 53409 Madrass Solatium 35kg/m³ 90x200x12 inkl trikåöverdrag
DHCnr 53411 Madrass Solatium 35kg/m³ 105x200x12 inkl trikåöverdrag
DHCnr 53412 Madrass Solatium 35kg/m³ 120x200x12 inkl trikåöverdrag
- **Bottenmadrass Prima 6** för patient med låg risk för trycksår. Skumbottenmadrass som ska användas tillsammans med en bäddmadrass; fiber, skum el luft.
DHCnr 57324 Bottenmadrass Prima 6 85x200x6 inkl hygienöverdrag
DHCnr 57325 Bottenmadrass Prima 6 90x200x6 inkl hygienöverdrag
DHCnr 57326 Bottenmadrass Prima 6 105x200x6 inkl hygienöverdrag

Förebyggande madrasser för patient med låg risk för trycksår

- **Bäddmadrass mjukfiber** för patient med låg risk för trycksår. Fiberbäddmadrass som ska toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning.
DHCnr 56911 Bäddmadrass 90x200 mjukfiber 3-delad
DHCnr 56912 Bäddmadrass 105x200 mjukfiber 3-delad
DHCnr 56913 Bäddmadrass 120x200 mjukfiber 3-delad
- **Bäddmadrass Optimal Solett** för patient med låg risk för trycksår som väger under 60kg. Skumbäddmadrass som ska toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning.
DHCnr 34230 Bäddmadrass Optimal Solett 85x200x6 inkl hygienöverdrag
DHCnr 36717 Bäddmadrass Optimal Solett 90x200x6 inkl hygienöverdrag
DHCnr 36239 Bäddmadrass Optimal Solett 105x200x6 inkl hygienöverdrag

Förebyggande/behandlande madrasser t.o.m. sårkategori 2

- **Bäddmadrass Optimal 5 Zon** för patient med risk för trycksår eller med redan uppkommet trycksår kategori 1-2. Skumbäddmadrass som ska toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning.
DHCnr 31230 Bäddmadrass Optimal 5zon 85x200x6 inkl hygienöverdrag
DHCnr 42391 Bäddmadrass Optimal 5zon 90x200x6 inkl hygienöverdrag
DHCnr 46976 Bäddmadrass Optimal 5zon 105x200x6 inkl hygienöverdrag
DHCnr 39618 Bäddmadrass Optimal 5zon 120x200x6 inkl hygienöverdrag
- **Bäddmadrass CuroCell S.A.M. PRO** för patient med risk för trycksår eller med redan uppkommet trycksår kategori 1-2 (3). Statisk luftbäddmadrass som ska toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning.
DHCnr 56126 Bäddmadrass CuroCell S.A.M PRO 85x200x10 inkl hygienöverdrag
DHCnr 56906 Bäddmadrass CuroCell S.A.M PRO 90x200x10 inkl hygienöverdrag
DHCnr 56907 Bäddmadrass CuroCell S.A.M PRO 105x200x10 inkl hygienöverdrag

- **Madrass Stratum Sense** för patient med risk för trycksår eller med redan uppkommet trycksår kategori 1-2. Skummadrass som ska läggas direkt på sängbotten.
DHCnr 57577 Madrass Stratum Sense 85x200x14 inkl hygienöverdrag
DHCnr 57578 Madrass Stratum Sense 90x200x14 inkl hygienöverdrag
DHCnr 57579 Madrass Stratum Sense 105x200x14 inkl hygienöverdrag
DHCnr 57580 Madrass Stratum Sense 120x200x14 inkl hygiensöverdrag

Förebyggande/behandlande madrasser t.o.m. sårkategori 3

- **Bäddmadrass CuroCell A4 CX10** för patient med medelhög risk för trycksår när frekvent lägesändring inte är möjlig. Kan användas som en del i behandlingen upp till och med trycksår kategori 3 (4). Luftväxlande bäddmadrass som ska toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning.
DHCnr 56908 Bäddmadrass CuroCellA4 CX10 85x200x10 inkl hygienöverdrag o väska
DHCnr 56909 Bäddmadrass CuroCellA4 CX10 90x200x10 inkl hygienöverdrag o väska
DHCnr 56910 Bäddmadrass CuroCellA4 CX10 105x200x10 inkl hygienöverdrag o väska
- **Madrass Static Air** för patient med medelhög risk för trycksår när frekvent lägesändring inte är möjlig. Kan användas som en del i behandlingen upp till och med trycksår kategori 3. Skum/luftmadrass som ska läggas direkt på sängbotten.
DHCnr 57594 Madrass Static Air 85x200x15 inkl hygienöverdrag
DHCnr 57595 Madrass Static Air 90x200x15 inkl hygienöverdrag
DHCnr 57596 Madrass Static Air 105x200x15 inkl hygienöverdrag

Förebyggande/behandlande madrasser t.o.m. sårkategori 4

- **Bäddmadrass ROHO** för patient med hög risk för trycksår när frekvent lägesändring inte är möjlig. Kan användas som en del i behandlingen upp till och med trycksår kategori 4. Eller ett ickeklassificerbart trycksår eller misstänkt djup hudskada. Statisk luft bäddmadrass som ska toppa en madrass eller bottenmadrass. Resår i hörnen för fastsättning.
*DHCnr 57608 Bäddmadrass Roho 86x190,5x8,5 inkl handpump och handcheckhandske **Order läggs via konsulent***
- **Madrass CuroCell A4 CX15** för patient med hög risk för trycksår när frekvent lägesändring inte är möjlig. Kan användas som en del i behandlingen upp till och med trycksår kategori 4. Eller ett ickeklassificerbart trycksår eller misstänkt djup hudskada. Växeltrycksmadrass som ska läggas direkt på sängbotten och sättas fast i sängens rörliga delar.
DHCnr 57562 Madrass CuroCell A4 CX15 85x200x15 inkl hygienöverdrag, lakanshållare o väska
DHCnr 57563 Madrass CuroCell A4 CX15 90x200x15 inkl hygienöverdrag, lakanshållare o väska
DHCnr 57564 Madrass CuroCell A4 CX15 105x200x15 inkl hygienöverdrag, lakanshållare o väska

Standardmadrass Solatium

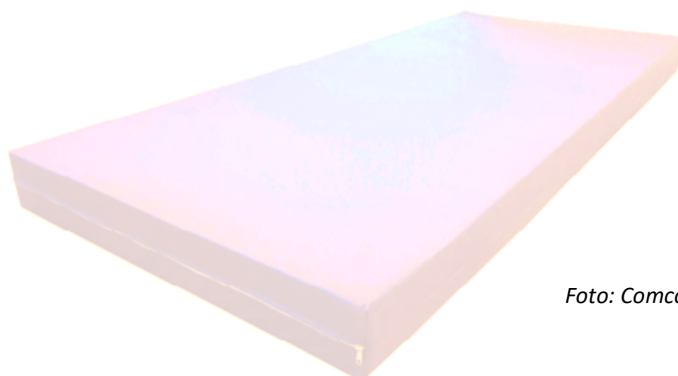


Foto: Comco

Produktinformation

Madrass patient med låg risk för trycksår. Madrassen **placeras direkt på sängbotten** och levereras med trikåöverdrag och är lämplig att använda i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö och förskrivs ffa tillsammans med hemsjukvårdssäng. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form.

Hygienöverdrag (tillval) har dragkedja på tre sidor med ett avtagbart madrassfodral som är slitstarkt och avtorkningsbart.

Fakta

| | |
|---------------------------|--|
| Material: | Kallsaum 35 kg/m ³ |
| Höjd: | 12 cm |
| Rekommenderad brukarvikt: | 0-130 kg |
| Garanti: | 2 år |
| Rengöring överdrag: | Trikåöverdraget (medföljer) är tvättbart i 60 grader Hygienöverdrag (tillval) är avtorkningsbart med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas. |
| Leverantör: | Comco |
| Debiteringsform: | Försäljning |

- DHCnr 53410** Madrass Solatium 35kg/m³ 85x200x12 inkl trikåöverdrag
- DHCnr 53409** Madrass Solatium 35kg/m³ 90x200x12 inkl trikåöverdrag
- DHCnr 53411** Madrass Solatium 35kg/m³ 105x200x12 inkl trikåöverdrag
- DHCnr 53412** Madrass Solatium 35kg/m³ 120x200x12 inkl trikåöverdrag

- DHCnr 53785** Hygienöverdrag 90x200x12 m dragkedja
- DHCnr 53786** Hygienöverdrag 105x200x12 m dragkedja
- DHCnr 53787** Hygienöverdrag 120x200x12 m dragkedja

Bottenmadrass Prima 6



Foto: Care of Sweden

Produktinformation

PRIMA 6 är en enkel och funktionell bottenmadrass som **placeras direkt på sängbotten och toppas med bäddmadrass**; typ en CuroCell A4CX10 (luftmadrass) eller bäddmadrass Optimal 5zon (skum). Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som är mycket enkel att rengöra och hantera. Det elastiska och följsamma överdraget är ångpermeabelt, vilket minskar risken för hudmaceration.

Fakta

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Material:</i> | <i>Kallskum 35 kg/m³</i> |
| <i>Höjd:</i> | <i>6 cm</i> |
| <i>Rekommenderad brukarvikt:</i> | <i>0-130 kg</i> |
| <i>Garanti:</i> | <i>3 år</i> |
| <i>Rengöring överdrag:</i> | <i>Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas.</i> |
| <i>Leverantör:</i> | <i>Care of Sweden</i> |
| <i>Debiteringsform:</i> | <i>Försäljning</i> |

- DHCnr 57324** Bottenmadrass Prima 6 85x200x6 inkl hygienöverdrag
- DHCnr 57325** Bottenmadrass Prima 6 90x200x6 inkl hygienöverdrag
- DHCnr 57326** Bottenmadrass Prima 6 105x200x6 inkl hygienöverdrag

Bäddmadrass mjukfiber 3-delad



Foto: Comco

Produktinformation

Förebyggande bäddmadrass som läggs ovanpå befintlig madrass till patient med låg risk för att utveckla trycksår. Uppskattad av patient med värk och smärta. Bäddmadrassen består av glatta fibrer som motverkar skjuvning, som sker i bäddmadrassen istället för i patientens egen vävnad. Bäddmadrassen består av tre separata madrassdelar som har ett sammanhängande madrassfodral med tre fickor. Genom att byta plats på sektionerna förlängs madrassens livslängd. Levereras komplett med tygöverdrag. **Resårband finns i hörnen för att kunna fästa bäddmadrassen i befintlig madrass.**

Fakta

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Material:</i> | <i>Silkoniserad polyesterhålfiber</i> |
| <i>Rekommenderad brukarvikt:</i> | <i>0-95kg</i> |
| <i>Garanti:</i> | <i>2 år</i> |
| <i>Rengöring:</i> | <i>Bomullsöverdrag: maskintvätt max 90 °C, kan torktumlas. Madrass: maskintvätta max 60 °C, kan torktumlas på låg värme till stryktorr. OBS! Får ej torktumlas i för hög temperatur, då fibrerna i madrassen klumpar ihop sig.</i> |
| <i>Leverantör:</i> | <i>Comco</i> |
| <i>Debiteringsform:</i> | <i>Försäljning</i> |

DHCnr 56911 Bäddmadrass 90x200 mjukfiber 3-delad

DHCnr 56912 Bäddmadrass 105x200 mjukfiber 3-delad

DHCnr 56913 Bäddmadrass 120x200 mjukfiber 3-delad

Bäddmadrass Optimal Solett

OBSERVERA: DENNA MADRASS ÄR INTE UPPHANDLAD MEN INGÅR ÄNDÅ I VÅRT SORTIMENT.

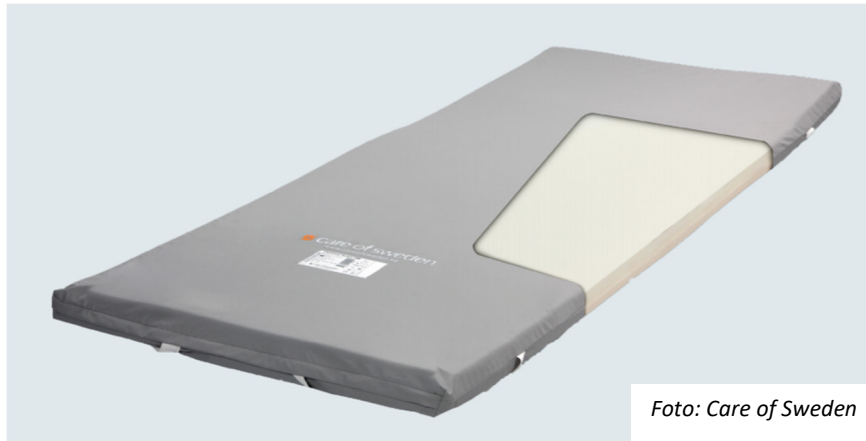


Foto: Care of Sweden

Produktinformation

En förebyggande bäddmadrass och som placeras ovanpå befintlig madrass och används som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med sårkategori 1. Den är speciellt framtagen för lätta och känsliga personer genom att den är extra mjuk och följsam. Hygienöverdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor och är ångpermeabelt vilket minskar risken för hudmaceration. **Resårband finns i hörnen för att kunna fästa bäddmadrassen i befintlig madrass.**

Fakta

| | |
|----------------------------------|---|
| <i>Material:</i> | <i>Kallskum 35 kg/m³ och trögskum 50 kg/m³</i> |
| <i>Höjd:</i> | <i>12 cm</i> |
| <i>Rekommenderad brukarvikt:</i> | <i>0-60 kg</i> |
| <i>Garanti:</i> | <i>2 år</i> |
| <i>Rengöring:</i> | <i>Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas.</i> |
| <i>Leverantör:</i> | <i>Care of Sweden</i> |
| <i>Debiteringsform:</i> | <i>Försäljning</i> |

DHCnr 34230 Bäddmadrass Optimal Solett 85x200x6 inkl hygienöverdrag
DHCnr 36717 Bäddmadrass Optimal Solett 90x200x6 inkl hygienöverdrag
DHCnr 36239 Bäddmadrass Optimal Solett 105x200x6 inkl hygienöverdrag

Bäddmadrass Optimal 5zon



Foto: Care of Sweden

Produktinformation

En förebyggande bäddmadrass och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med sårkategori 2. **Den läggs ovanpå befintlig madrass och har resårband i hörnen för att fästa mot undermadrassen.** Madrassen är sågad i kuber för att ge god tryckutjämning. Madrassen är speciellt tillverkad för att minimera påverkan av skjuv- och friktionskrafter. Levereras med ett vätsketätt hygienöverdrag som är ångapermeabelt.

Fakta

| | |
|---------------------------|---|
| Material: | Kallskum 65 kg/m ³ |
| Höjd: | 6 cm |
| Rekommenderad brukarvikt: | 0-150 kg |
| Garanti: | 2 år |
| Rengöring överdrag: | Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas. |
| Leverantör: | Care of Sweden |
| Debiteringsform: | Försäljning |

- DHCnr 31230** Bäddmadrass Optimal 5zon 85x200x6 inkl hygienöverdrag
- DHCnr 42391** Bäddmadrass Optimal 5zon 90x200x6 inkl hygienöverdrag
- DHCnr 46976** Bäddmadrass Optimal 5zon 105x200x6 inkl hygienöverdrag
- DHCnr 39618** Bäddmadrass Optimal 5zon 120x200x6 inkl hygienöverdrag

Bäddmadrass CuroCell S.A.M. PRO

Nyhet



Foto: Care of Sweden

Produktinformation

CuroCell S.A.M. PRO är en bäddmadrass med effektiv tryckfördelning genom konstant lågt tryck som används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2 (3).

Pumpen har komfortreglage gör det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att CuroCell S.A.M. PRO kan användas under lång tid och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller vald tryck- och komfortnivå vilket innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs. Detta minimerar ljud och vibrationer samt bidrar till en lång livslängd och låg energiförbrukning för pumpen. CuroCell S.A.M. PRO levereras med ett hygienöverdrag som är ångpermeabelt vilket minskar risken för hudmaceration. Ej hälffunktion. **Resårband finns i hörnen för att kunna fästa bäddmadrassen i befintlig madrass.**

Madrassen och pump ska alltid fraktas i medföljande väska.

Fakta

| | |
|---------------------------|---|
| Höjd: | 10 cm |
| Rekommenderad brukarvikt: | 0-250 kg |
| Garanti: | 2 år |
| Rengöring: | Överdrag: Avtorkning med ljummet vatten och tvållösning alt. med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas. Kontrollenhet: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. |
| Leverantör: | Care of Sweden |
| Debiteringsform: | Hyra |

DHCnr 56126 Bäddmadrass CuroCell S.A.M PRO 85x200x10 inkl hygienöverdrag

DHCnr 56906 Bäddmadrass CuroCell S.A.M PRO 90x200x10 inkl hygienöverdrag

DHCnr 56907 Bäddmadrass CuroCell S.A.M PRO 105x200x10 inkl hygienöverdrag

Äldre versioner av CuroCell S.A.M. utgår ur sortimentet men så länge de finns kvar i rekondsnurran kommer de ligga i tvingande ersättningsgrupp med nya versionen. Detta innebär att när äldre versioner finns på lager, så går dessa ut först.

Madrass Stratum Sense


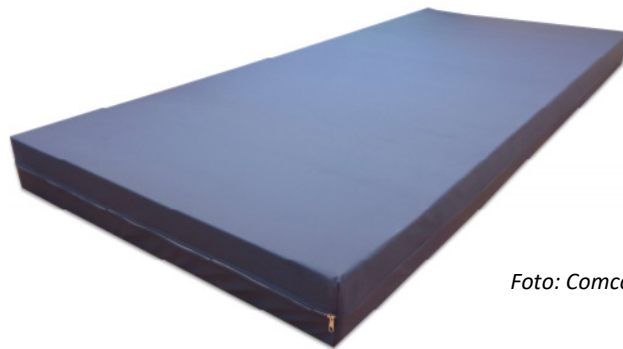


Foto: Comco

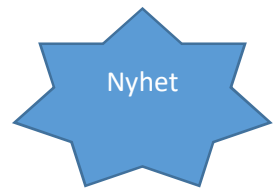

Produktinformation

Stratum Sens är en trycksårsförebyggande madrass som understödjer behandling av trycksår kategori 1-2. **Madrasen läggs direkt på sängbotten** och är försedd med avtorkningsbart hygienöverdrag med bärhandtag och droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Evakueringsöverdrag finns som tillbehör och köps i dagsläget separat.


Fakta

| | |
|---------------------------|---|
| Material: | Kallskum 52kg/m ³ |
| Höjd: | 14 cm |
| Rekommenderad brukarvikt: | 0-150kg |
| Garanti: | 3 år |
| Rengöring överdrag: | Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas. |
| Leverantör: | Comco |
| Debiteringsform: | Försäljning |

- DHCnr 57577** Madrass Stratum Sense 85x200x14 inkl hygienöverdrag
- DHCnr 57578** Madrass Stratum Sense 90x200x14 inkl hygienöverdrag
- DHCnr 57579** Madrass Stratum Sense 105x200x14 inkl hygienöverdrag
- DHCnr 57580** Madrass Stratum Sense 120x200x14 inkl hygiensöverdrag

- DHCnr 57585** Evakueringsöverdrag Stratum Sense 90x200x14
- DHCnr 57586** Evakueringsöverdrag Stratum Sense 105x200x14
- DHCnr 57587** Evakueringsöverdrag Stratum Sense 120x200x14

Bäddmadrass CuroCellA4 CX10

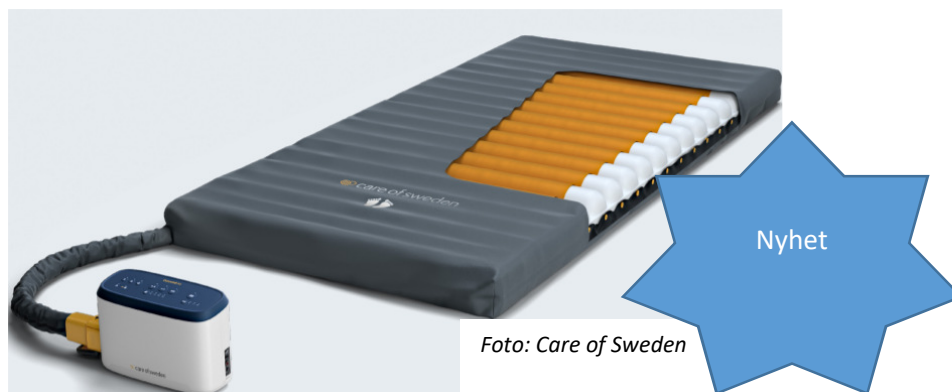

Produktinformation

CuroCell A4 CX10 är en luftmadrass som används för förebyggande och behandlande syfte upp till sårkategori 3 (4). Det är en bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass och den är utvecklad för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat. Kontrollenheten hanterar automatisk alla inställningar för att optimera trycket utifrån användarens behov. Hållfunktion finns i form av att de 6 nedersta cellerna är lägre. Alla celler ingår i luftväxlingen. Systemet har statiskt läge som underlättar vid omvårdnad/förflyttning samt tre aktiva programlägen: pulserande, alternerande och konstant lågt tryck. Luften recirkulerar för att undvika nedkyllning. En funktion för utsugning av luft inför nedpackning finns.

Resårband finns i hörnen för att kunna fästa bäddmadrassen i befintlig madrass.

Madrasen och pump ska alltid fraktas i medföljande väska.

Fakta

| | |
|---------------------------|--|
| Höjd: | 10 cm |
| Rekommenderad brukarvikt: | 0-200 kg |
| Garanti: | 2 år |
| Rengöring: | Överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas. Kontrollenhet: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. |
| Leverantör: | Care of Sweden |
| Debiteringsform: | Hyra |

DHCnr 56908 Bäddmadrass CuroCellA4 CX10 85x200x10 inkl hygienöverdrag o väska
DHCnr 56909 Bäddmadrass CuroCellA4 CX10 90x200x10 inkl hygienöverdrag o väska
DHCnr 56910 Bäddmadrass CuroCellA4 CX10 105x200x10 inkl hygienöverdrag o väska

Bäddmadrass CuroCell3 CX13 utgår ur sortimentet men kommer finnas i rekondsnurran och ligga i tvingande ersättningsgrupp med CuroCell A4 CX10. Detta innebär att när äldre versioner finns på lager, så går dessa ut först.

Madrass Static Air



Foto: Gate RD



Produktinformation

Static Air är en kombinationsmadrass av luft och skum, **läggs direkt på sängbotten** och används i förebyggande och behandlande syfte upp till sårkategori 3. Madrassen har ingen elektrisk pump utan luftväxlingen bygger på att brukaren med en viss regelbundenhet vänder sig för att skapa luftcirkulation från sätesdel till hälavlastningsdel. De 6 nedersta cellerna har hälfunktion med lägre och annorlunda formade celler. **Om patientens status är mycket begränsad/orörlig ska hälavlastningsfunktionen kontrolleras minst en gång/dag för att säkerställa att denna är tillräckligt luftfylld. Om man vid kontroll över tid upplever att hälavlastningsdelen är tom på luft så är ej denna produkt lämplig att använda för aktuell patient.** Madrassen levereras med elastiskt överdrag med droppkant.

Innan madrassen används första gången ska madrassen läggas plant i minst 2 timmar. OBS! Läs noggrant bruksanvisningen om hur luftsystemet aktiveras.

Fakta

| | |
|---------------------------|---|
| Höjd: | 15 cm |
| Rekommenderad brukarvikt: | 0-254 kg |
| Garanti: | 5 år |
| Rengöring överdrag: | Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 85 °C, kan torktumlas max 75 °. Överdraget måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka på madrassen. |
| Leverantör: | Direct HelthCare Group/GateRD |
| Debiteringsform: | Försäljning |

DHCnr 57594 Madrass Static Air 85x200x15 inkl hygienöverdrag
DHCnr 57595 Madrass Static Air 90x200x15 inkl hygienöverdrag
DHCnr 57596 Madrass Static Air 105x200x15 inkl hygienöverdrag

Bäddmadrass ROHO

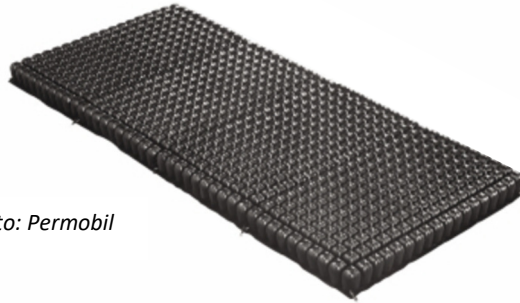
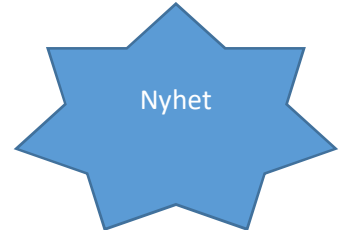


Foto: Permobil

**OBSERVERA! DENNA MADRASS KAN INTE BESTÄLLAS VIA KUNDSERVICE
UTAN ENDAST VIA KONSULENT***Produktinformation*

Bäddmadrass Roho består av fyra separata sektioner som kan justeras oberoende av varandra och bidra till konstant lågt tryck under hela kroppen. Bäddmadrassen har ingen elektrisk luftpump. Vid behov kan enskild del bytas ut mot skumsektion, mått per sektion är 86x49 cm. Madrassen levereras med vätsketätt överdrag och handchecks-handske.

Fakta

| | |
|----------------------------------|---|
| <i>Material:</i> | <i>Neoprenceller 10x18 st/sektion</i> |
| <i>Höjd:</i> | <i>8,5 cm</i> |
| <i>Rekommenderad brukarvikt:</i> | <i>Ingen viktgräns men storleken måste passa patienten</i> |
| <i>Garanti:</i> | <i>2 år</i> |
| <i>Rengöring:</i> | <i>Överdrag: Maskintvätt max 60 °C, kan torktumlas på låg temp. Madrass: <u>Ventilerna måste vara stängda vid rengöring!</u> Madrassdel läggs i vatten och rengörs med mjuk borste eller trasa. För desinfektion kan madrassdel ligga i vatten med desinfektionsmedel i 10 min efter diskning, sköjs noggrant och lufttorkas.</i> |
| <i>Leverantör:</i> | <i>Permobil</i> |
| <i>Debiteringsform:</i> | <i>Hyra</i> |

DHCnr 57608 Bäddmadrass Roho 86x190,5x8,5 inkl handpump och handcheckhandske

Madrass CuroCell A4 CX15



Foto: Care of Sweden

Nyhet

Produktinformation

Madrass CuroCell A4 CX15 är en luftmadrass som **läggs direkt på sängbotten** och som används i förebyggande och behandlande syfte upp till sårkategori 4 samt oklassificerade trycksår. Det är en madrass och är utvecklad för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat. Kontrollenheten hanterar automatisk alla inställningar för att optimera trycket utifrån användarens behov. Hälfunktion finns i form av att de 6 nedersta cellerna är lägre. De två översta cellerna ingår inte i luftväxlingen. Systemet har statiskt läge som underlättar vid omvårdnad/förflyttning samt tre aktiva programlägen: pulserande, alternerande och konstant lågt tryck. Luften recirkulerar för att undvika nedkyllning. En funktion för utsugning av luft inför nedpackning finns.

Madrass och pump ska alltid fraktas i medföljande väska.

Fakta

| | |
|---------------------------|--|
| Höjd: | 15 cm |
| Rekommenderad brukarvikt: | 0-200 kg |
| Garanti: | 2 år |
| Rengöring: | Överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, kan torktumlas. Kontrollenhet: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. |
| Leverantör: | Care of Sweden |
| Debiteringsform: | Hyra |

DHCnr 57562 Madrass CuroCell A4 CX15 85x200x15 inkl hygienöverdrag, lakanshållare o väska

DHCnr 57563 Madrass CuroCell A4 CX15 90x200x15 inkl hygienöverdrag, lakanshållare o väska

DHCnr 57564 Madrass CuroCell A4 CX15 105x200x15 inkl hygienöverdrag, lakanshållare o väska

Madrass CuroCell4 PRO och CuroCell Auto420 utgår ur sortimentet men kommer finnas i rekondsnurran och ligga i tvingande ersättningsgrupp med CuroCell A4 CX15. Detta innebär att när de äldre versionerna finns på lager, så går dessa ut först.

Benämningar:

Evacöverdrag är ett hygienöverdrag med evakueringsfunktion. Det vill säga att man vid eventuell evakuering kan låta personen ligga kvar på madrassen och med överdragets hjälp evakuera. Viktigt att innan dokumentera vilka personer som har sådana överdrag.

Distanstyg är ett tjockare tyg som ligger mellan överdraget och luftcellerna för att öka komforten.

Kompressor/pump är den enhet som tillför luft till luftmadrasserna.

Bäddmadrass menas en tunnare madrass som läggs uppe på befintlig madrass/bottenmadrass el resår-madrass. **Bäddmadrassen har resårband i varje hörn** för fastsättning i befintlig madrass/bottenmadrass. Bedömning av underliggande madrass måste alltid göras för att funktionen av bäddmadrassen ska fungera som tänkt. Viktigt att se över grindhöjden om grind bedömts ska användas vid användning av högre madrasser.

Madrass menas att den ska läggas direkt på sängbotten. Denna madrass ska ersätta alla andra madrasser. Kan inte placeras på resår-madrass pga att risken att den glider mot resår-madrassen. Vid placering i hemsjukvårdssäng får madrassen endast sättas fast i sängens rörliga delar annars kommer madrassen gå sönder.

Bottenmadrass menas att den ska läggas direkt på sängbotten och toppas med en bäddmadrass. Denna madrass är tunnare och måste kombineras med en bäddmadrass fiber/skum/luft.