



# Sara Stedy

- Sara Stedy är en överflyttningsplattform med sitstöd, leverantören Arjo har lagt den under ISOkod för uppresningslyft (el).
- I bruksanvisningen används en standardtext för Arjos samtliga produkter då de är ett globalt företag.
- Arjo vill dock även klargöra att det inte är ett krav att utrustningen kontrolleras av en behörig tekniker ifall användaren själv utför regelbundna kontroller enligt schemat i bruksanvisning.

## Kontroller som användaren själv utför

Åtgärd/kontroll	Före varje användning	Varje vecka	Varje år
<b>Transportutrustning</b>			
Inspektera alla yttre delar. Alla funktioner måste testas så att de fungerar ordentligt, för att säkerställa att inga skador har uppstått under tidigare användning.	X		
Kontrollera om några delar saknas eller är trasiga.	X		X
Kontrollera om fästknopparna för selen på lyften har skador eller sprickor.			X
Kontrollera att styrhjulen sitter fast ordentligt vid chassit.		X	
Kontrollera att alla styrhjul kan vrida sig fritt och att de två bakhjulsbromsarna går att slå till.	X		

Åtgärd/kontroll	Före varje användning	Varje vecka	Varje år
Kontrollera de främre och bakre styrhjulen regelbundet avseende hår och skräp; rengör när så krävs.		X	
Undersök alla utsatta delar, i synnerhet de som kommer i beröring med patientens kropp. Kontrollera att de inte har några sprickor eller vassa kanter som kan skada patienten eller vårdgivaren eller som kan försämra hygien. Ersätt vid behov och dekontaminera.		X	
Kontrollera att chassibenen fälls ut som de ska. Mekanismen måste fällas ut fritt utan att använda överdriven kraft.		X	
Kontrollera att det halkskyddande materialet är ordentligt fastlimmat vid chassit. Byt ut vid behov.			X
Kontrollera benens utfällningsmekanism under lyftens basdel. Kontrollera att rörliga delar inte sitter alltför löst och att inget hår eller annat skräp har fastnat.			X

- DHC har lagt Sara Stedy som en överflyttningsplattform i Sesam (ej besiktning).
- Det är ett hyreshjälpmedel och känner man sig osäker på hjälpmedlet lägger man en AO på avhjälpande underhåll som ingår i hyran.
- Annars kommer de kontrolleras vid retur som alla andra hjälpmedel och det är viktigt att vi får in hjälpmedlen för rekond då vi alltid kontrollerar hjälpmedlets funktioner.